

ZiNⁱc[®]

Implants à connexion hexagonale interne



Zinic[®]

Manuel de procédure chirurgicale

 **Ziacom[®]**



Informations importantes

À lire attentivement avant d'utiliser les produits Ziacom®

Informations d'ordre général

Ce document contient des informations de base pour l'utilisation des systèmes d'implants dentaires originaux Ziacom®, ci-après dénommés implants dentaires Ziacom® ou simplement produits Ziacom®. Cette documentation a été rédigée sous forme d'un guide de référence rapide destiné au praticien responsable du traitement, ci-après l'« utilisateur », et ne constitue donc ni une alternative ni un substitut à une formation spécialisée ou à une expérience clinique professionnelle.

Les produits Ziacom® doivent être utilisés en effectuant une planification de traitement adéquate et en suivant rigoureusement les protocoles chirurgicaux et prothétiques du fabricant. Lisez attentivement les protocoles chirurgicaux et prothétiques spécifiques à chaque produit, ainsi que les instructions du mode d'emploi et d'entretien avant d'utiliser un produit Ziacom®. Vous pouvez également les consulter sur notre site web www.ziacom.com ou les demander à votre distributeur officiel agréé Ziacom® le plus proche.

Informations sur la responsabilité, la sécurité et la garantie.

Les indications d'utilisation et de manipulation des produits Ziacom® sont fondées sur la bibliographie internationale publiée, les normes cliniques actuelles et sur notre expérience ; elles doivent donc être comprises comme des informations générales indicatives. La manipulation et l'utilisation des produits Ziacom®, échappant au contrôle de Ziacom Medical SL, relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur. Ziacom Medical SL, ses filiales et/ou ses distributeurs officiels agréés déclinent toute responsabilité, expresse ou implicite, totale ou partielle, pour tout éventuel dommage ou préjudice causé par une manipulation incorrecte du produit ou par tout autre événement non prévu dans ses protocoles et manuels d'utilisation correcte de ses produits.

L'utilisateur du produit doit s'assurer que le produit Ziacom® utilisé est adapté à la procédure et à l'objectif final prévu. Ni ce mode d'emploi, ni les protocoles de travail ou de manipulation des produits ne dispensent l'utilisateur de cette obligation. L'utilisation, la manipulation et l'application clinique des produits Ziacom® doivent être effectuées par un personnel professionnel qualifié possédant les qualifications requises, conformément à la législation en vigueur dans chaque pays.

L'utilisation, la manipulation et/ou l'application, en tout ou en partie, des produits Ziacom® dans l'une de leurs phases de réalisation, par un personnel non qualifié ou sans les qualifications requises, annule automatiquement tout type de garantie et peut provoquer de graves dommages à la santé du patient.

Les produits Ziacom® font partie d'une systématique propre, avec des caractéristiques de conception et des protocoles de travail propres, incluant les implants dentaires, les compléments ou composants prothétiques et les instruments chirurgicaux ou prothétiques. L'utilisation de produits Ziacom® en combinaison avec des éléments ou des composants d'autres fabricants, peut provoquer un échec du traitement, causer des dommages aux tissus, aux structures osseuses, des résultats esthétiques inappropriés et de graves dommages à la santé du patient. Pour cette raison, seuls les produits originaux Ziacom® doivent être utilisés.

Le clinicien, chargé du traitement, est seul responsable de l'utilisation des produits originaux de Ziacom® et de les utiliser conformément au mode d'emploi et aux protocoles de manipulation pertinents pendant tout le processus de traitement implantaire. L'utilisation de composants, d'instruments ou de tout autre produit non original Ziacom®, utilisés seuls ou en combinaison avec l'un des produits originaux Ziacom®, annulera automatiquement toute garantie des produits originaux Ziacom®.

Veillez vous référer au programme de garantie Ziacom Medical SL (disponible sur le SITE WEB ou en contactant Ziacom Medical SL, ses filiales ou ses distributeurs agréés).


Avertissement. Les produits Ziacom® ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez vérifier la disponibilité.

La marque Ziacom® et les autres noms et logos de produits ou de services mentionnés dans cette documentation ou sur le site www.ziacom.com sont des marques déposées de Ziacom Medical SL.

Ziacom Medical SL se réserve le droit de modifier, changer ou éliminer n'importe lequel de ses produits, prix ou spécifications techniques référencés sur cette page Web ou dans l'un de ses documents sans préavis. Tous droits réservés. La reproduction ou publication totale ou partielle de cette documentation est interdite, sur quelques support ou format que ce soit, sans l'autorisation écrite de Ziacom Medical SL est interdite.



Together for health

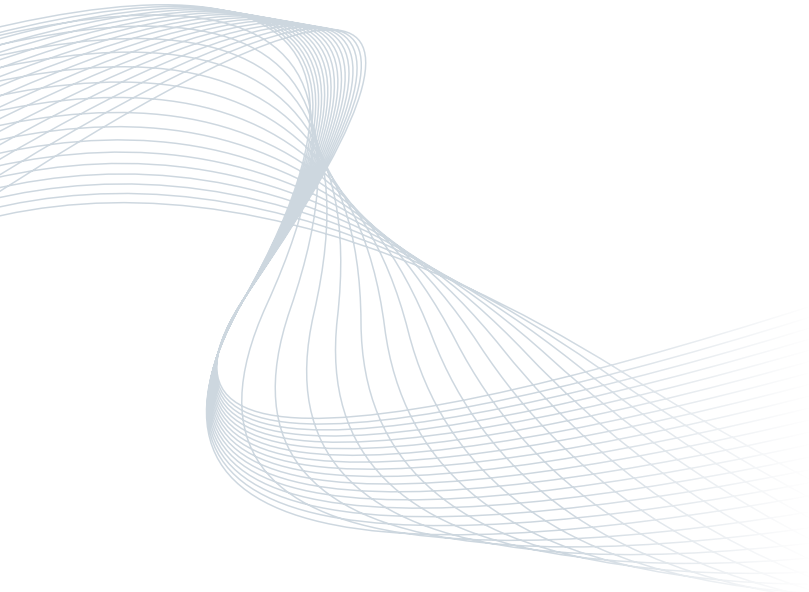

Index

Zinic® | Implants à connexion hexagonale interne

Caractéristiques	06
Diamètres et longueurs	07
Traitements de surface	08
- Surface Titansure	08
Présentation du produit	10
Références Zinic®	12
Recommandations d'utilisation	14

Protocole chirurgical Zinic®

Considérations générales	16
Étapes du protocole de fraisage	18
Insertion de l'implant avec Mount ZPlus Titansure	20
Insertion de l'implant avec Ziacom® No Mount Titansure	22
Conditionnement du tissu mou	23
Protocole chirurgical simplifié	24
Nettoyage, désinfection et stérilisation	30

Caractéristiques

CONNEXION


- Connexion hexagonale interne.
- Profondeur de l'hexagone de la prothèse de 1,5 mm : améliore la répartition des forces longitudinales.
- Chanfrein conique : réduit les infiltrations.
- Friction conique : réduit les micromouvements.
- Platform Switch : modelage des tissus mous et façonnage du profil d'émergence.

ZONE CORTICALE


- Conception microfiletage : préserve l'os marginal.
- Extension microfiletage : améliore la répartition des charges.
- Macroconception : compression corticale optimale.
- Zone usinée de 0,2 mm en biseau.

CORPS



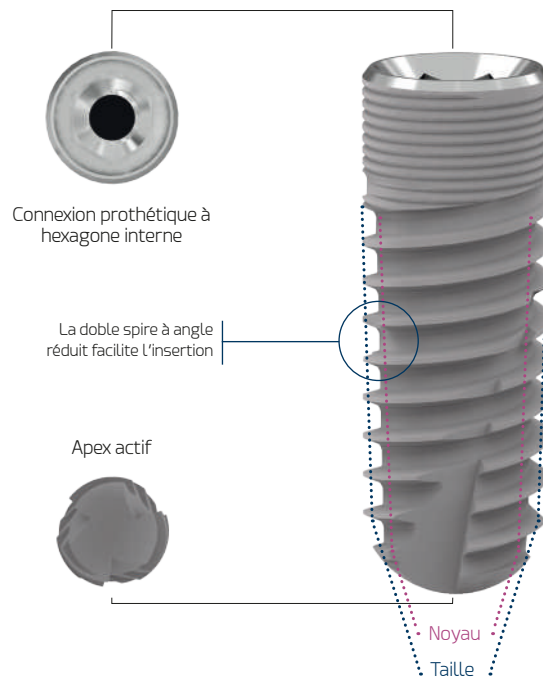



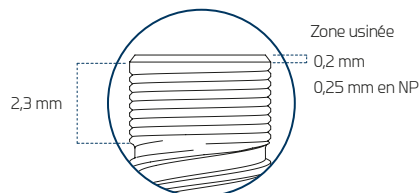




















- Spires actives à angle réduit : favorisent la stabilité lors de l'insertion et augmentent le BIC (contact os-implant).
- Double spire : insertion rapide et temps chirurgical réduit.
- Apex actif autotaraudant : facilite l'insertion dans l'infrafraseage.
- Fenêtres apicales transversales : recueillent les débris osseux lors de l'insertion.
- Morphologie optimisée : grande stabilité primaire.
- Apex atraumatique : non préjudiciable aux structures anatomiques.



Mesures de la zone coronaire de l'implant



Diamètres et longueurs

Ø DIAMÈTRE	Ø PLATEFORME	LONGUEUR (L)				
		8,5	10	11,5	13	14,5
● NP 3,30	3,20					
● RP 3,70	3,50					
● RP 4,00						
● RP 4,30						
● WP 4,60	4,50					
● WP 5,00						

Cotes en mm.

Traitements de surface

■ Surface Titansure

Il a été démontré que les surfaces traitées superficiellement améliorent l'ostéointégration en augmentant le contact os-implant. Cela est dû en partie à la composition chimique de l'implant et aussi à ses caractéristiques topographiques.


Avec sa surface **Titansure**, Ziacom Medical obtient une topographie de surface exempte de contaminants et une macro et microporosité avec des valeurs moyennes optimales dont les caractéristiques sont essentielles pour obtenir une ostéointégration correcte et rapide, ce qui lui confère une très bonne fiabilité et une grande prévisibilité.

■ ANALYSE DE LA SURFACE TITANSURE

La surface **Titansure** est de type SLA et est obtenue par soustraction en effectuant un sablage avec du corindon blanc suivi d'un double mordantage à l'acide fluorhydrique et une combinaison d'acide sulfurique et d'acide phosphorique.


Analyse morphologique de la surface

À l'aide d'un microscope électronique à balayage (FEI TENEO, Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, É.-U.), on a pu observer la surface rugueuse et poreuse avec de nombreuses cavités aux bords fins et tranchants.

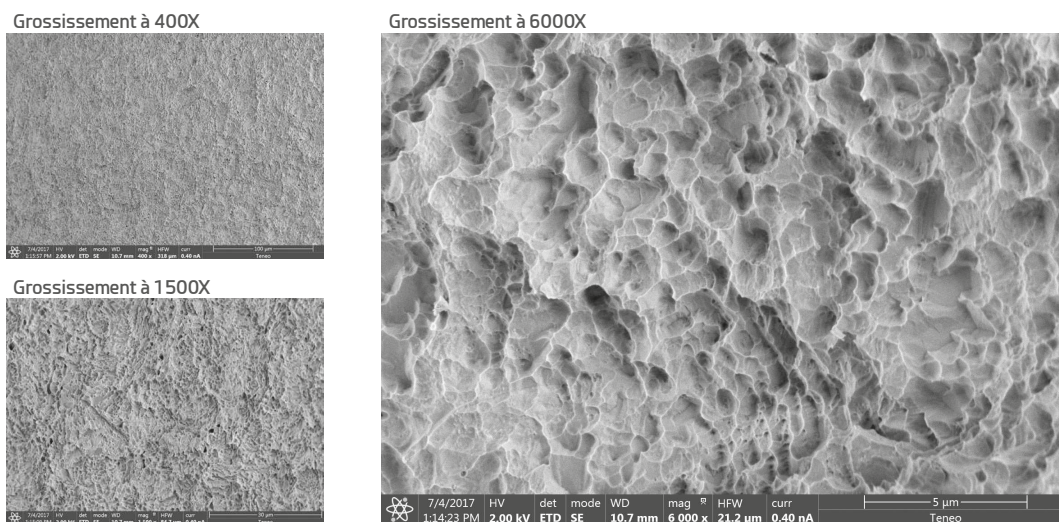

Analyse élémentaire de la surface

La composition chimique de la surface a été analysée à l'aide d'un spectromètre à rayons X à dispersion d'énergie (Octane Super, Edax-Ametek, Mahwah, NJ, É.-U.).

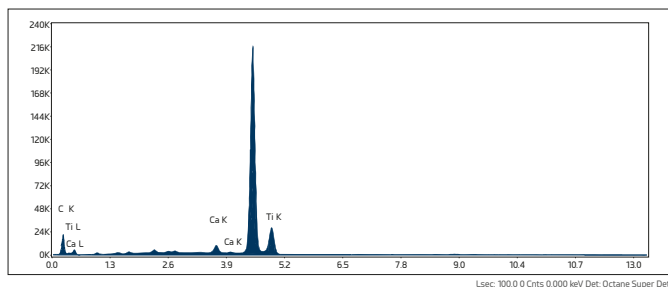

Analyse compositionnelle de la surface de l'implant

ELEMENT	WEIGHT (%)
C K	9,32 (10,23)
Al K	-
Ti K	89,53 (11,77)

No aluminum was detected

Les résultats de l'analyse sont exprimés sous forme de moyenne et d'écart type du pourcentage de teneur en masse [WEIGHT (%)].


Analyse de la rugosité de la surface

L'étude de rugosité a été menée à l'aide du microscope confocal-interférométrique Sensofar S NEOX (Sensofar Medical, Terrasa, Espagne) et du logiciel SensoMAP Premium 7.4. Les paramètres de rugosité quantitatifs utilisés étaient la rugosité moyenne du profil (Ra), l'écart moyen du profil de rugosité (Rq), la hauteur maximale du pic du profil de rugosité (Rp) et la profondeur maximale de la vallée du profil de rugosité (Rv).

Ra (µm) (SD)	Rq (µm) (SD)	Rp (µm) (SD)	Rv (µm) (SD)
0,82 (0,10)	0,97 (0,08)	1,84 (0,04)	2,21 (0,01)

La rugosité tridimensionnelle de la surface (Sa), la hauteur moyenne tridimensionnelle (Sq), la hauteur maximale tridimensionnelle du pic (Sp) et la profondeur maximale tridimensionnelle de la vallée de la zone sélectionnée (Sv) ont également été enregistrées.

Sa (µm) (SD)	Sq (µm) (SD)	Sp (µm) (SD)	Sv (µm) (SD)
0,76 (0,01)	0,97 (0,01)	4,20 (0,12)	4,62 (0,20)

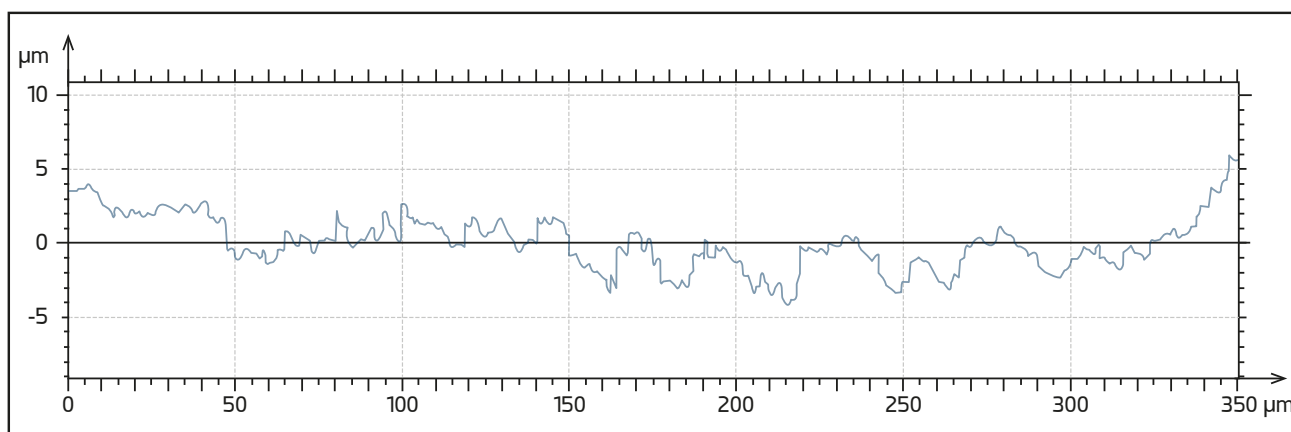

Les données sont tirées de la publication suivante :

Rizo-Gorrita, M.; Fernandez-Asian, I.; Garcia-de-Frenza, A.; Vazquez-Pachon, C.; Serrera-Figallo, M.; Torres-Lagares, D.; Gutierrez-Perez, J. Influence of Three Dental Implant Surfaces on Cell Viability and Bone Behavior. An In Vitro and a Histometric Study in a Rabbit Model. Appl. Sci. 2020, 10(14), 4790

■ OSTÉOINTÉGRATION OPTIMALE

La surface **Titansure** est caractérisée par une structure de surface tridimensionnelle avec des pics élevés et de larges vallées, structure dont l'efficacité est connue pour favoriser la cascade de coagulation et la libération de facteurs de croissance par l'activation des plaquettes [Kim, H. ; Choi, S.H. ; Ryu, J.J. ; Koh, S.Y. ; Park, J.H. ; Lee, I.S. The biocompatibility of SLA-treated titanium implants. Biomed. Mater. 2008, 3, 025011].

Ce type de surface pourrait avoir un effet ostéogène grâce à ses différentes caractéristiques topographiques au niveau micrométrique et nanométrique, présentant une morphologie très similaire aux cavités de résorption ostéoclastique dans l'os [Le Guehennec, L. ; Goyenvalle, E. ; Lopez-Heredia, M.A. ; Weiss, P. ; Amouriq, Y. ; Layrolle, P. Histomorphometric analysis of the osseointegration of four different implant surfaces in the femoral epiphyses of rabbits. Clin. Oral Implants Res. 2008, 19, 1103–1110].

Pour obtenir de plus amples informations sur le traitement de surface, veuillez consulter la bibliographie disponible à l'adresse www.ziacom.com/biblioteca



Implant Zinic®

Présentation du produit

■ Conditionnement sous plaquette

Disponible pour les implants ayant une surface **Titansure**. La plaquette est thermosoudée et comprend une étiquette d'identification du produit afin d'en assurer une bonne traçabilité. Sa languette facilite l'ouverture en cabinet et empêche toute ouverture accidentelle.

Titansure

Option Mount ZPlus



Option Zicom® No Mount



IMPORTANT

Ne pas ouvrir l'emballage stérile avant la pose de l'implant.

■ Étiquette d'identification externe

Les implants Zicom® sont présentés dans une boîte en carton scellée contenant l'étiquette d'identification du produit avec une description de ses principales caractéristiques.

CE 0051	Zicom®	Implante Dental	ES	ZICOM MEDICAL, SI Calle Balmes, 2 - 28520 Pinto - Madrid España T: +34 91 723 33 06 M: +34 91 723 33 06 F: +34 91 723 33 06
Rx Only	ZSS3711	Dental Implant	EN	
RP	Z0000000	Zahnimplantat	DE	
ZINIC® 3,70X11,5mm	ZPlus®	Implant Dentaire	FR	
1	RP Ø3,70X11,5mm	Implante Dentale	IT	
TT	(01)08435481202025(17)000000(11)000000(10)Z0000000	Implante Dentário	PT	
TT	www.zicom.com			
STERILE R				

Explication des symboles utilisés

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| CE 0051 | MDD certifié CE et organisme notifié | ⊗ | Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé |
| MD | Nom du dispositif médical | ⊗ | Ne pas réutiliser |
| LOT | Numéro de lot du produit | 📖 | Consulter le mode d'emploi |
| 📖 | Site web d'information pour les patients | 🕒 | Date de péremption du produit |
| UDI | Identifiant unique du produit | 🏭 | Date de fabrication |
| STERILE R | Stérilisation par rayonnement | 🏭 | Fabricant du produit |
| 🌡 | Limite de température | TT | Traitements de surface Titansure |
| ⚠ | Attention, voir la documentation jointe | TT Active | Traitements de surface Titansure Active |
| ⊗ | Ne pas restériliser | Rx Only | Caution: federal law prohibits dispensing without prescription |

Tous les détails de la présentation du produit et son mode d'emploi sont disponibles sur www.zicom.com/ifus ou via le code QR présent sur la boîte.



■ Option Mount ZPlus

Parmi les options de présentation disponibles pour l'implant Zinic® figure le Mount **ZPlus**, un pilier multifonction conçu en titane de grade 5 ELI (usage médical), qui facilite la manipulation de l'implant pendant l'intervention et intègre de multiples fonctionnalités. En outre, le concept fondamental du Mount **ZPlus** est de réduire les coûts du traitement du fait qu'il peut être utilisé comme porte-implants, pilier d'empreinte ou pilier provisoire pour ciment-transvissée.

Le Mount **ZPlus** est disponible pour les gammes d'implants Zinic®, Zinic® MT, ZM4, ZM4 MT et ZM1.


Comme nous l'avons indiqué, le Mount **ZPlus** peut être utilisé comme pilier provisoire. Dans ces cas-là, le **ZPlus** doit être sculpté en extra-buccal, en l'ajustant sur l'analogue et de préférence sur un modèle de laboratoire ou monté sur une poignée de serrage. En outre, il faut confirmer l'intégrité structurelle du Mount et de sa vis et s'assurer qu'ils n'ont pas été déformés ou endommagés par un couple d'insertion excessif ou une manipulation de retrait forcée. Il faut également vérifier l'assise de la vis de fixation du **ZPlus** et l'ajustement de la connexion sur l'analogue.

IMPORTANT


Placez toujours l'implant conformément aux spécifications du protocole chirurgical afin de protéger le Mount et sa vis de tout dommage pouvant empêcher son utilisation ultérieure comme pilier d'empreinte et/ou pilier provisoire. Chaque **ZPlus** ne doit être utilisé que sur le même implant auquel il appartient. Vous devez conserver le **ZPlus** et sa vis avec l'identification du patient, en précisant le numéro de référence et de lot de l'implant afin d'éviter toute confusion ou échange. Le **ZPlus** est décliné avec trois faces plates. Une fois l'implant inséré, veillez à ce que l'une des faces coïncide avec la zone vestibulaire.

Utilisations du Mount ZPlus




Comme porte-implants

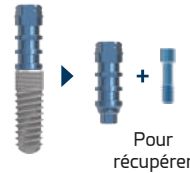

Comme pilier d'empreinte

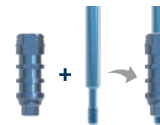

Comme pilier provisoire pour ciment-transvissée

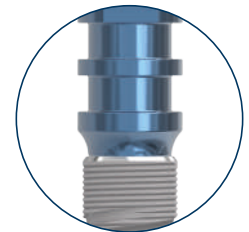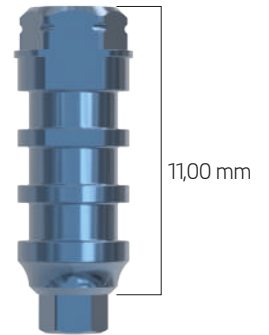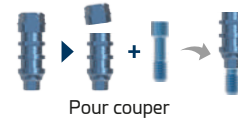


Vue implant + Mount

■ Option Ziacom® No Mount

L'implant Zinic® est présenté dans la fiole porte-implant Ziacom® No Mount (sans support) ; une fiole, en plastique, abrite l'implant en position verticale entre une plaque inférieure et une rondelle supérieure, toutes deux en titane, assurant ainsi une stabilité sans mouvement tout en évitant les contacts.

Ce conditionnement permet de retirer l'implant de la fiole et de l'amener sur le site chirurgical facilement et en toute sécurité en le saisissant directement par sa connexion.

De cette façon, l'implant Ziacom® No Mount élimine le risque de réduction de la stabilité primaire associé à la surinstrumentation. Il évite la manipulation de l'implant lors du démontage du Mount et réduit également la difficulté d'insertion de l'implant dans les secteurs postérieurs avec une ouverture buccale réduite.

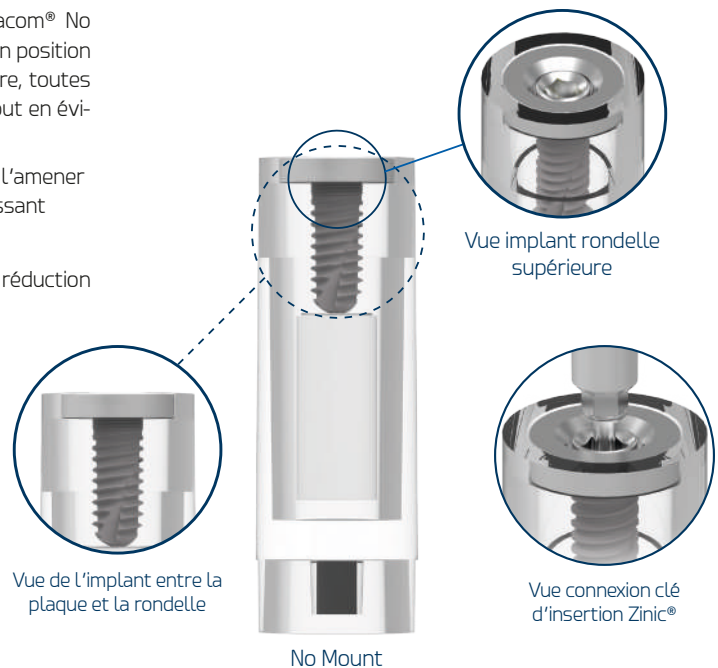

Références Zinic®

■ Références Zinic® avec ZPlus - Titansure

IMPLANT					
	Ø (mm)	Ø Noyau (mm)	Longueur (mm)	Réf. Titansure	
Zinic®	3,30	2,90/2,65	10,0	ZSS3310	
			11,5	ZSS3311	
			13,0	ZSS3313	
			14,5	ZSS3314	
3,70	3,20/2,80	8,5	ZSS3785		
		10,0	ZSS3710		
		11,5	ZSS3711		
		13,0	ZSS3713		
4,00	3,40/3,05	8,5	ZSS4085		
		10,0	ZSS4010		
		11,5	ZSS4011		
		13,0	ZSS4013		
4,30	3,70/3,30	8,5	ZSS4385		
		10,0	ZSS4310		
		11,5	ZSS4311		
		13,0	ZSS4313		
4,60	3,90/3,55	8,5	ZSS4685		
		10,0	ZSS4610		
		11,5	ZSS4611		
		13,0	ZSS4613		
5,00	4,15/3,75	8,5	ZSS5085		
		10,0	ZSS5010		
		11,5	ZSS5011		
			13,0	ZSS5013	

Métrique



Métriques de 1,60 (NP) et 1,80 (RP/WP).

Vis de fermeture*






Platf.	Longueur (L)	Référence
	4,20	ZNPT
	4,20	ZRPT
	4,20	ZWPPT

Anodisée NP RP WP



*Vis déjà incluse dans chaque implant.

Plateforme

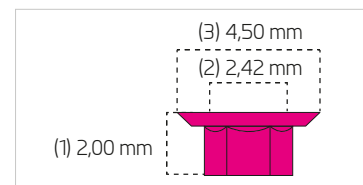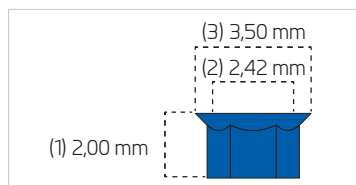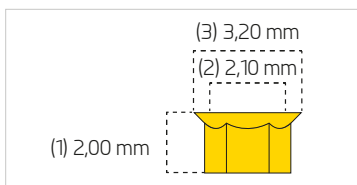

1) Profondeur de l'hexagone interne. 2) Distance entre les faces de l'hexagone interne. 3) Diamètre de la plateforme de travail.

■ Références Zinic® avec Ziacom® No Mount - Titansure

IMPLANT			
Ø (mm)	Ø Noyau (mm)	Longueur (mm)	Réf. Titansure
3,30	2,90/2,65	10,0	ZSS3310F
		11,5	ZSS3311F
		13,0	ZSS3313F
		14,5	ZSS3314F
3,70	3,20/2,80	8,5	ZSS3785F
		10,0	ZSS3710F
		11,5	ZSS3711F
		13,0	ZSS3713F
4,00	3,40/3,05	8,5	ZSS4085F
		10,0	ZSS4010F
		11,5	ZSS4011F
		13,0	ZSS4013F
4,30	3,70/3,30	8,5	ZSS4385F
		10,0	ZSS4310F
		11,5	ZSS4311F
		13,0	ZSS4313F
4,60	3,90/3,55	8,5	ZSS4685F
		10,0	ZSS4610F
		11,5	ZSS4611F
		13,0	ZSS4613F
5,00	4,15/3,75	8,5	ZSS5085F
		10,0	ZSS5010F
		11,5	ZSS5011F
		13,0	ZSS5013F

Métrique



Métriques de 1,60 (NP) et 1,80 (RP/WP).

Vis de fermeture*






Platéf.	Longueur (L)	Référence
●	4,20	ZNPT
●	4,20	ZRPT
●	4,20	ZWPT

Anodisée ■ NP ■ RP ■ WP



* Vis déjà incluse dans chaque implant.

Plateforme

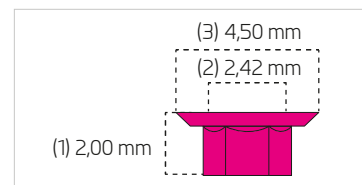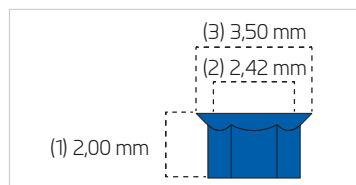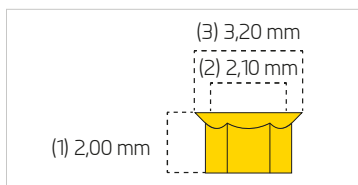

1) Profondeur de l'hexagone interne. 2) Distance entre les faces de l'hexagone interne. 3) Diamètre de la plateforme de travail.

Recommandations d'utilisation

Tout traitement implantaire doit respecter la stabilité biomécanique naturelle de la cavité buccale et permettre l'émergence naturelle de la couronne dentaire à travers les tissus mous. L'implantologue doit évaluer la quantité et la qualité de l'os existant dans la zone receveuse de l'implant et envisager la nécessité d'une régénération osseuse préalable ou simultanée selon le cas.

Ziacom® dispose d'une large gamme d'implants permettant de couvrir toutes les possibilités de restauration existantes. Les diamètres et les plateformes des implants recommandés pour chaque position de dent sont indiqués dans les cercles de l'odontogramme.

Ces recommandations sont valables pour le remplacement des dents par des restaurations unitaires, des bridges, des hybrides ou des prothèses adjoindes.

N'oubliez pas de respecter des distances minimales entre les implants adjacents et entre les implants et les dents afin de préserver les papilles, la vascularisation osseuse et les profils d'émergence naturels.

Le choix de l'implant adapté à chaque cas relève de la seule responsabilité de l'implantologue. Ziacom® recommande de tenir compte des avertissements fondés sur les preuves scientifiques figurant dans les catalogues de produits et sur le site web.

■ ÉCLAIRCISSEMENTS SUR LES MESURES ET LES TECHNIQUES DE FRAISAGE

- **TAILLE DE L'IMPLANT** : détermine le diamètre et la longueur de l'implant.
- **CORPS DE L'IMPLANT** : diamètre du noyau de l'implant.
- **TAILLE DE LA FRAISE** : correspond au diamètre de la fraise.
- **TECHNIQUE DE FRAISAGE** : nous avons développé les différents protocoles de fraisage de façon à vous permettre d'aborder de manière schématique les différentes situations qui se présentent face à une chirurgie avec implants.

Odontogramme

Zinic®


Diamètre de l'implant⁽¹⁾

● NP ● A RP ● B RP ● C RP ● WP ● WP
 Ø3,30mm Ø3,70mm Ø4,00mm Ø4,30mm Ø4,60mm Ø5,00mm

1) Les diamètres sont disponibles pour les plateformes analogues

Diamètre coronaire de l'implant

● NP ● RP ● WP
 Ø3,20mm Ø3,50mm Ø4,50mm

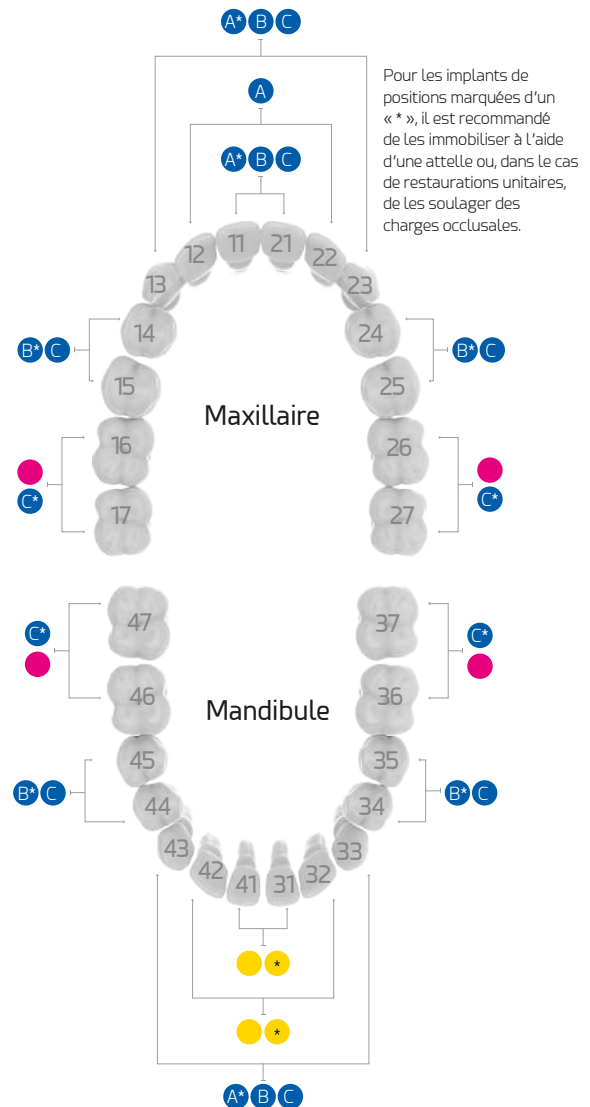

Pour obtenir de plus amples informations sur le choix de la taille de l'implant, veuillez consulter la bibliographie disponible à l'adresse www.ziacom.com/biblioteca



Protocole
chirurgical



Considérations générales

■ Système de fraises Ziacom®

Les fraises des systèmes d'implants Ziacom® sont fabriquées en acier inoxydable. Les fraises doivent être manipulées avec soin en évitant tout dommage susceptible de compromettre leur efficacité. Assurez-vous que les fraises sont en bon état. En cas de doute, évitez de les utiliser.

■ INDICATIONS POUR LA SÉQUENCE DE FRAISAGE

- Les fraises doivent être insérées dans le contre-angle, moteur chirurgical à l'arrêt, en veillant à ce que l'ancrage et la rotation soient corrects avant de commencer le fraisage.
- Les fraises doivent être utilisées avec une irrigation externe.
- La vitesse et le couple de serrage recommandés par fraise doivent être respectés. (Voir protocole de fraisage).
- Avant de commencer le fraisage, positionnez la fraise à l'emplacement choisi pour l'insertion de l'implant.
- Faites des mouvements de va-et-vient contrôlés, en fraisant l'os jusqu'à la profondeur souhaitée, guidé par le repère laser de cette profondeur.
- Retirez la fraise du site chirurgical avec le moteur en marche.

REMARQUES


- Ne poursuivez pas le fraisage s'il n'y a pas d'irrigation.
- Si vous utilisez un prolongateur de fraises, complétez l'irrigation manuellement.
- Pour les fraises chirurgicales et corticales, un maximum de 45 utilisations par fraise est recommandé. Le dépassement de l'usage recommandé compromet le processus d'ostéointégration de l'implant.
- Si vous remarquez que la fraise est endommagée, évitez de l'utiliser et remplacez-la par une nouvelle.
- Après chaque utilisation, stérilisez-la en suivant les instructions de nettoyage et de stérilisation (page 30). Le système de mesure de la longueur des fraises chirurgicales Ziacom® est simple et permet de nous guider lors du processus de fraisage du site chirurgical.

■ Fraises chirurgicales

Le système de mesure de la longueur des fraises chirurgicales Ziacom® est simple et permet de nous guider lors du processus de fraisage du site chirurgical.


Le marquage laser sur la tige des fraises permet de déterminer leur diamètre et la bande horizontale du marquage laser sur la partie active représente les différentes longueurs des implants (fraises millimétrées).

La longueur de l'embout de la fraise est de 0,5 mm et n'est pas incluse dans les mesures des différentes marques laser. Lors de la pose de l'implant sans soulèvement du lambeau, mesurez l'épaisseur du tissu mou avec une sonde parodontale et ajoutez cette mesure à la profondeur de fraisage.

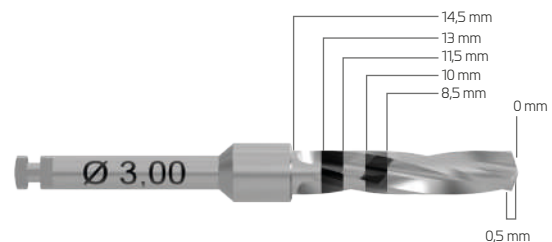

■ Tarauds chirurgicaux

L'utilisation du taraud chirurgical pour la mise en forme du filetage de chaque implant dépend du type d'os. (Voir étapes de la pose des implants Zinic® - étape 9/page 19.) Des tarauds pour contre-angle et pour une utilisation manuelle sont disponibles. La sélection de chacun d'eux dépend du cas et de la préférence du praticien. Le marquage laser sur la tige des tarauds permet de déterminer leur diamètre et la bande horizontale du marquage laser sur la partie active représente les différentes longueurs.

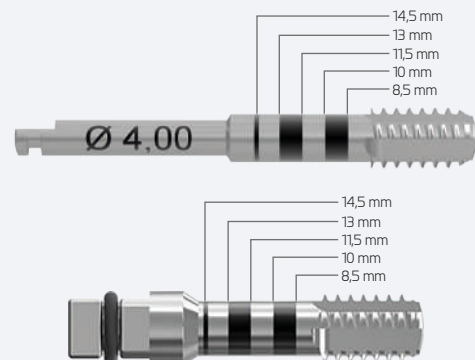

Protocole chirurgical

Étapes du protocole de fraisage

■ Implant Zinic®


Zinic®

- EXEMPLE :
Implant Zinic®
Ø 4,00 x 11,50 mm
- RP (Ø 4,00 mm)
Ø plateforme 3,50 mm



ÉTAPE PRÉLIMINAIRE | Ouverture de la gencive

Faites une incision et soulevez le lambeau.

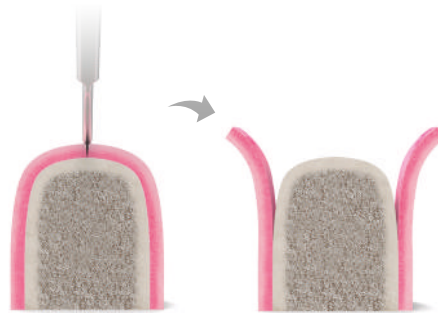

ÉTAPE 1 | Fraise lance

Commencez la séquence de fraisage du site chirurgical avec la fraise lance Réf. SID00 jusqu'à sa butée (longueur 6,50 mm) ou avec la fraise lance millimétrée Réf. MSID00, ou la fraise lance Réf. MSID00T avec butée. Contrôlez la direction et l'inclinaison de la fraise en appliquant une pression intermittente toujours dans le plan vertical, en veillant à ne pas exercer une trop grande pression sur l'os. Si nécessaire, utilisez le prolongateur de fraises Réf. DEXT10.



ÉTAPE 2 | Fraise pilote Ø 2,30

Poursuivez la séquence de fraisage avec la fraise pilote Réf. OSPD23, jusqu'à ce que la longueur totale correspondant à l'implant sélectionné soit atteinte. Observez la marque laser sur la fraise indiquant la longueur ou utilisez la butée de fraise Réf. NTPD115.

Contrôlez la direction et l'inclinaison de la fraise en appliquant une pression intermittente toujours dans le plan vertical, en veillant à ne pas exercer une trop grande pression sur l'os. Si nécessaire, utilisez le prolongateur de fraises Réf. DEXT10.



ÉTAPE 3 | Sonde/Paralléliseur Ø 2,30

Vérifiez la profondeur du site chirurgical et l'axe d'insertion en insérant le sonde/paralléliseur Réf. MUR100. Vous pouvez répéter cette étape autant de fois que vous le jugez nécessaire tout au long de l'intervention chirurgicale.



ÉTAPE 4 | Fraise pilote Ø 2,80

Poursuivez la séquence de fraisage avec la fraise chirurgicale Ø 2,80 Réf. OSTD28, jusqu'à ce que la longueur totale correspondant à l'implant sélectionné soit atteinte.

Observez la marque laser sur la fraise indiquant la longueur ou utilisez la butée de fraise Réf. NTPD115. Contrôlez la direction et l'inclinaison de la fraise en appliquant une pression intermittente toujours dans le plan vertical, en veillant à ne pas exercer une trop grande pression sur l'os. Si nécessaire, utilisez le prolongateur de fraises Réf. DEXT10.



ÉTAPE 5 | Fraise finale Ø 3,00

Poursuivez la séquence de fraisage avec la fraise chirurgicale Ø 3,0 Réf. OSTD30, jusqu'à ce que la longueur totale correspondant à l'implant sélectionné soit atteinte. Observez la marque laser sur la fraise indiquant la longueur ou utilisez la butée de fraise Réf. NTPD115.



Contrôlez la direction et l'inclinaison de la fraise en appliquant une pression intermittente toujours dans le plan vertical, en veillant à ne pas exercer une trop grande pression sur l'os. Si nécessaire, utilisez le prolongateur de fraises Réf. DEXT10.



ÉTAPE 6 | Sonde/Paralléliseur Ø 3,00

Vérifiez la profondeur du site chirurgical et l'axe d'insertion en insérant le sonde/paralléliseur Réf. MUR200. Vous pouvez répéter cette étape autant de fois que vous le jugez nécessaire tout au long de l'intervention chirurgicale.



ÉTAPE 7 | Fraise finale Ø 3,25

Poursuivez la séquence de fraisage avec la fraise chirurgicale Ø 3,25 Réf. OTD32, jusqu'à ce que la longueur totale correspondant à l'implant sélectionné soit atteinte. Observez la marque laser sur la fraise indiquant la longueur ou utilisez la butée de fraise Réf. NTPD215. Contrôlez la direction et l'inclinaison de la fraise en appliquant une pression intermittente toujours dans le plan vertical, en veillant à ne pas exercer une trop grande pression sur l'os. Si nécessaire, utilisez le prolongateur de fraises Réf. DEXT10.



ÉTAPE 8 | Sonde/Paralléliseur Ø 3,25

Vérifiez la profondeur actuelle du site chirurgical et l'axe d'insertion en insérant le sonde/paralléliseur Réf. MUR300. Vous pouvez répéter cette étape autant de fois que vous le jugez nécessaire tout au long de l'intervention chirurgicale.



ÉTAPE 9 | Taraud

Placez le taraud chirurgical Ø 4,00 dans le site chirurgical. Appuyez fermement et commencez à tourner lentement, puis laissez le taraud avancer sans pression jusqu'à la profondeur prévue. Si une trop grande résistance est constatée, effectuez un mouvement de contre-rotation de 90° pour chaque tour complet. Pour retirer le taraud, tournez-le dans le sens opposé à celui de l'insertion. Le taraud Réf. TAPST40 peut être utilisé manuellement avec la clé à cliquet Réf. RATC50 ou avec le contre-angle Réf. MTAPOST40



L'utilisation du taraud dépend du type d'os :



Type I	Total
Type II	2/3
Type III-IV	Pas nécessaire

ÉTAPE 10 | Fraise corticale

Utilisez la fraise corticale Réf. OTD02CZ pour façonner la zone coronaire du site implantaire. Insérez la fraise jusqu'à sa marque laser.

Contrôlez la direction et l'inclinaison du fraisage en appliquant des pressions intermittentes toujours dans le plan vertical, en veillant à ne pas exercer une trop grande pression sur l'os. Si nécessaire pour réaliser cette étape, utilisez le prolongateur de fraises Réf. DEXT10.



L'utilisation de la fraise corticale dépend du type d'os :



Type I	Obligatoire
Type II	Dépend de l'épaisseur corticale
Type III-IV	Pas nécessaire


Protocole chirurgical

Étapes de la pose de l'implant avec Mount ZPlus | Titansure

Mount ZPlus


Traitement de surface

Titansure

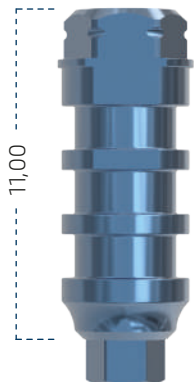

ÉTAPE 1 | Déballage de l'implant

- 1.1 Appuyez sur le mot « PRESS » et déchirez la boîte en carton de l'implant.
- 1.2 Enlevez le rabat en carton et retirez la plaquette.
- 1.3 Retirez délicatement le scellé de la plaquette.
- 1.4 Laissez tomber la fiole porte-implant sur un tissu stérile dans la zone chirurgicale.
- 1.5 N'oubliez pas de retirer l'étiquette d'identification de l'implant pour la coller sur la carte de l'implant et sur la fiche médicale du patient afin de maintenir la traçabilité du produit.

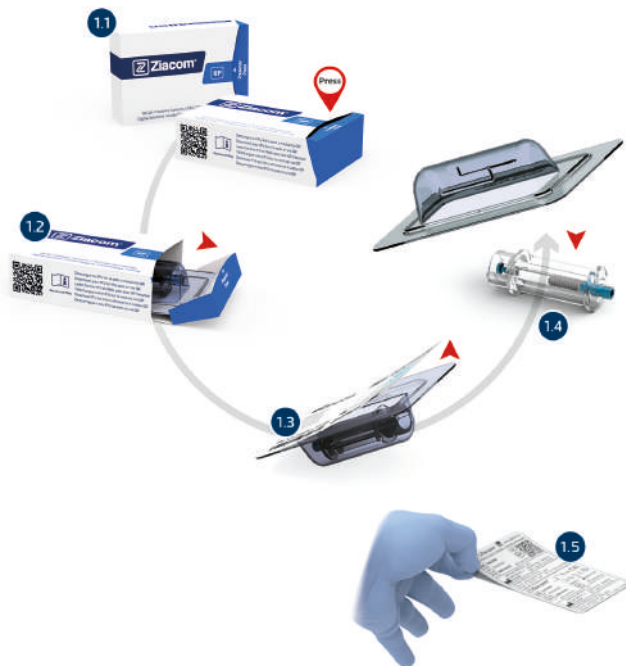


ÉTAPE 2 | Choix de l'instrument d'insertion

En fonction de la situation clinique et de l'accès à la zone, on peut choisir trois instruments différents pour insérer l'implant:


- A Contre-angle** : utilisez la clé d'insertion ZPlus. CA de la longueur de votre choix (Réf. 01MMIN/02MMIN) et insérez-la dans le contre-angle.
- B Clé à cliquet Réf. RATC50** : utilisez la clé d'insertion ZPlus. Clé à cliquet/Manuelle de la longueur de votre choix (Réf. XSMIN/TSMIN /TLMIN) et insérez-la dans la clé à cliquet en fonction « IN », identifiée par une flèche.
- C Poignée de tournevis 4x4 Réf. MADW10** : utilisez la clé d'insertion ZPlus. Clé à cliquet/Manuelle de la longueur de votre choix (Réf. XSMIN/TSMIN / TLMIN) et insérez-la dans la poignée de tournevis.

ÉTAPE 3 | Retrait de l'implant de sa fiole

Tenez la fiole porte-implant d'une main et insérez la clé d'insertion sélectionnée dans le ZPlus de l'autre main. Retirez l'ensemble implant-Mount vers le haut dans le sens vertical.

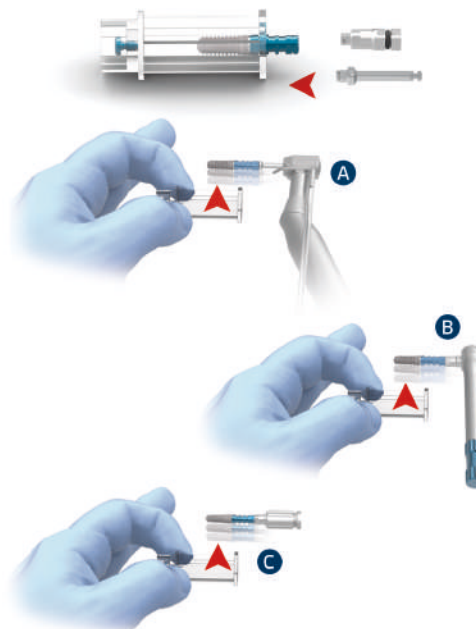

ÉTAPE 4 | Insertion de l'implant

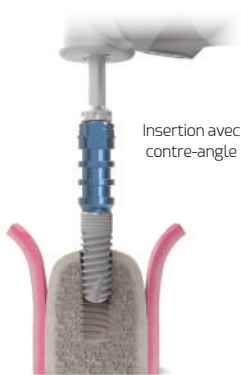


Insérez l'implant dans le site chirurgical en contrôlant la direction et l'inclinaison. Lors de l'insertion avec un contre-angle, utilisez une vitesse maximale de 25 tr/min. Le couple d'insertion recommandé se situe entre 35 et 50 Ncm selon le cas sans être limité à un seul couple.


Si une résistance est constatée lors de l'insertion, il est recommandé de tourner légèrement l'implant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et, après une pause de quelques secondes, de poursuivre l'insertion. Répétez ce processus autant de fois que nécessaire.

Le protocole chirurgical Ziacom® établit la position crestale de la plateforme de l'implant.

Le ZPlus a trois faces plates. Une fois l'implant inséré, veillez à ce que l'une des faces coïncide avec la zone vestibulaire.

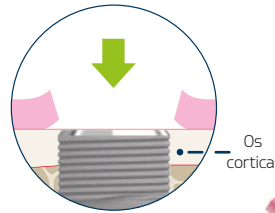


Le protocole chirurgical Ziacom® établit la position crestale de la plateforme de l'implant.

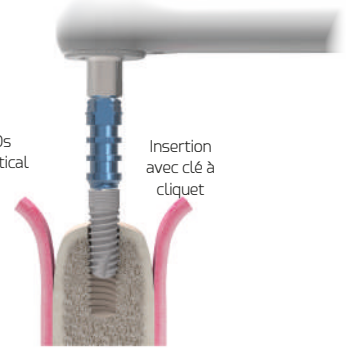


ÉTAPE 5 | Démontage du Mount ZPlus

Verrouillez le Mount ZPlus avec la clé d'arrêt Réf. 01MOHW et enlevez la vis à l'aide du tournevis chirurgical manuel Réf. SMSD/LMSD. Une fois la vis enlevée, retirez le ZPlus manuellement.

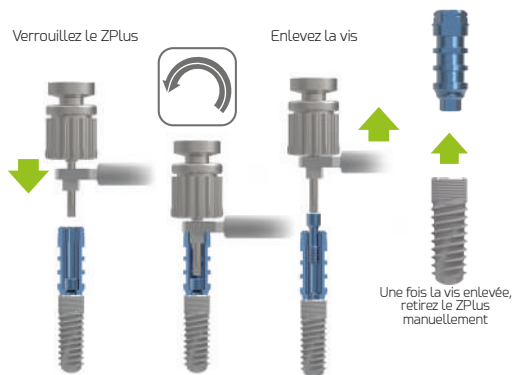

ÉTAPE 5A | Démontage du Mount ZPlus

Pour éviter la déformation du Mount ZPlus ou la soudure à froid avec l'implant, le point d'insertion où il faut le démonter dépend du type d'os.

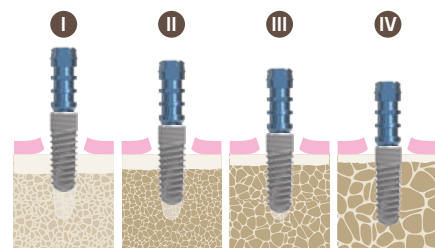


Type I	À 1/2 d'insertion
Type II	À 3/4 d'insertion
Type III	À 4/5 d'insertion
Type IV	Avec insertion complète

* Fondé sur la classification de la qualité osseuse selon Lekholm et Zarb 1985

ÉTAPE 5B | Démontage du Mount ZPlus



Une fois la vis clinique enlevée, insérez la vis d'extraction

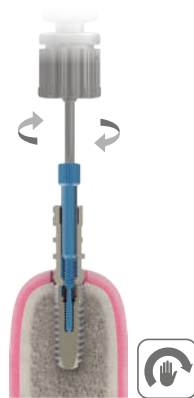

Tournez le tournevis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il entre en contact avec l'implant, tournez d'un quart de tour supplémentaire pour déverrouiller



Une fois le Mount libéré, enlevez la vis d'extraction

En cas de grippage ou de soudure à froid du ZPlus sur l'implant après son insertion, évitez de manipuler le Mount avec des instruments d'une manière qui pourrait nuire à sa stabilité primaire. Utilisez uniquement la vis d'extraction Ziacom® Réf. EDSZ34 (RP/WP).

En insérant la vis d'extraction avec un tournevis chirurgical manuel Réf. SMSD/LMSD et un couple manuel, dans le sens des aiguilles d'une montre, on obtient un contact attendu de son apex avec l'implant, ce qui déverrouille le support et le libère pour le retrait.



Protocole chirurgical

Étapes de la pose de l'implant avec No Mount | **Titansure**


Ziacom® No Mount

Traitement de surface

Titansure



ÉTAPE 1 | Déballage de l'implant

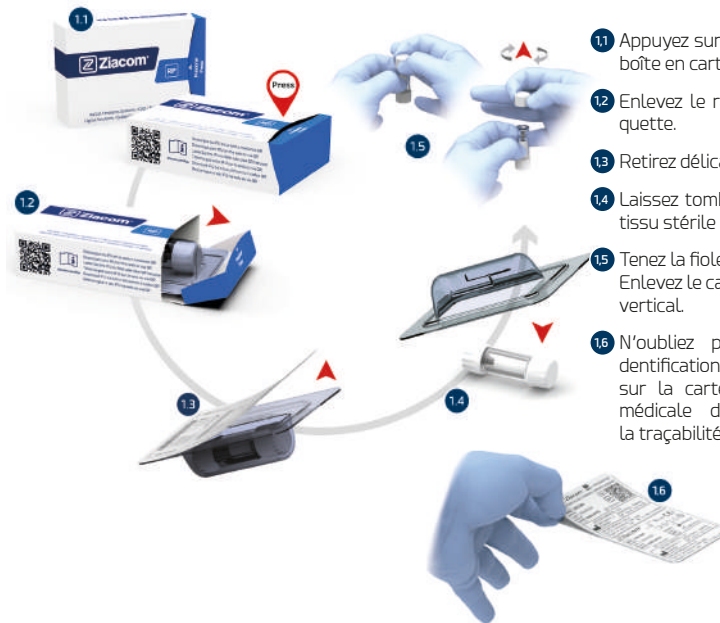

- 1.1 Appuyez sur le mot « PRESS » et déchirez la boîte en carton de l'implant.
- 1.2 Enlevez le rabat en carton et retirez la plaquette.
- 1.3 Retirez délicatement le scellé de la plaquette.
- 1.4 Laissez tomber la fiole porte-implant sur un tissu stérile dans la zone chirurgicale.
- 1.5 Tenez la fiole d'une main en position verticale. Enlevez le capuchon en tournant dans le sens vertical.
- 1.6 N'oubliez pas de retirer l'étiquette d'identification de l'implant pour la coller sur la carte de l'implant et sur la fiche médicale du patient afin de maintenir la traçabilité du produit.


ÉTAPE 2 | Choix de l'instrument d'insertion

En fonction de la situation clinique et de l'accès à la zone, on peut choisir trois instruments différents pour insérer l'implant:


- A Contre-angle** : utilisez la clé d'insertion Zinic®. CA Réf. MMZ1 et insérez-la dans le contre-angle.
- B Clé à cliquet Réf. RATC50** : utilisez la clé d'insertion Zinic®. Clé à cliquet/Manuelle de la longueur de votre choix (Réf. SMZ1/LMZ1) et insérez-la dans la clé à cliquet en fonction « IN », identifiée par une flèche.
- C Poignée de tournevis 4x4 Réf. MADW10** : utilisez la clé d'insertion Zinic®. Clé à cliquet/Manuelle de la longueur de votre choix (Réf. SMZ1/LMZ1) et insérez-la dans la poignée de tournevis.

ÉTAPE 3 | Retrait de l'implant de sa fiole

Tenez la fiole porte-implant verticalement d'une main et insérez la clé d'insertion sélectionnée dans l'implant de l'autre main. Retirez l'implant en le tirant vers le haut dans le sens vertical.

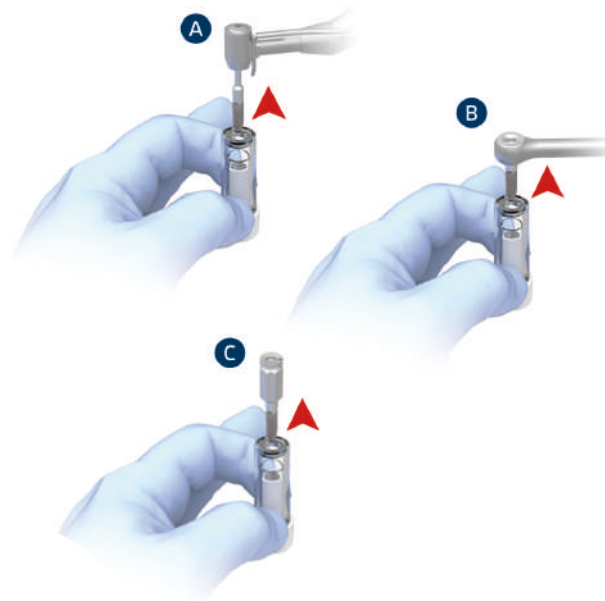

ÉTAPE 4 | Insertion de l'implant

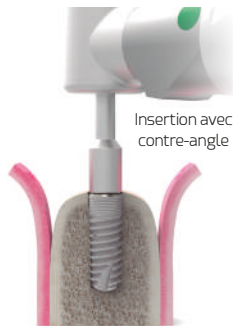


Insertion avec contre-angle

Lors de l'insertion avec un contre-angle, utilisez une vitesse maximale de 25 tr/min.


Le couple d'insertion recommandé se situe entre 35 et 50 Ncm.

Si une résistance est constatée lors de l'insertion, il est recommandé de tourner l'implant dans le sens inverse de l'insertion et, après une pause de quelques secondes, de poursuivre l'insertion. Répétez ce processus autant de fois que nécessaire.

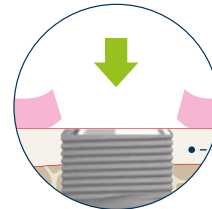

Os cortical


Le protocole chirurgical Ziacom® établit la position crestale de la plateforme de l'implant.

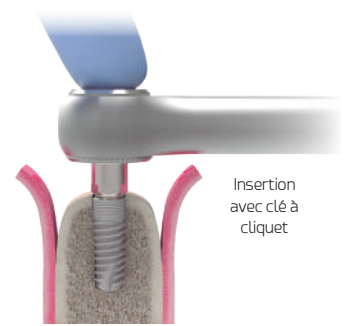

Insertion avec clé à cliquet

■ Conditionnement du tissu mou

ÉTAPE 1 | Mise en place de la vis de fermeture

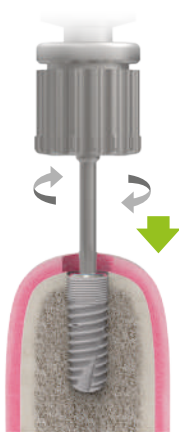

Enlevez la vis de fermeture de la barquette à l'aide du tournevis chirurgical manuel Réf. SMSD/LMSD, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Rapprochez-la de l'implant en évitant que la vis ne tombe et ne soit avalée accidentellement. Insérez-la dans l'implant jusqu'à sa fermeture, avec un couple de serrage manuel et dans le sens des aiguilles d'une montre.

La mise en place d'une vis de fermeture nécessite une seconde intervention chirurgicale pour découvrir l'implant et poser le pilier souhaité.

Selon le cas, vous pouvez choisir de ne pas mettre en place une vis de fermeture mais de placer directement un pilier de cicatrisation.



ÉTAPE 2 | Fermeture du tissu mou

Fermez et suturez le tissu mou en adaptant soigneusement les lambeaux.



ÉTAPE 3 | Découverte et retrait de la vis de fermeture



Localisez l'implant et faites une incision jusqu'à ce que la vis de fermeture soit découverte ou utilisez le bistouri circulaire Réf. MPU34 sur le tissu mou. Enlevez la vis à l'aide du tournevis chirurgical manuel Réf. SMSD ou LMSD.



ÉTAPE 4 | Pose du pilier de cicatrisation



Insérez le pilier de cicatrisation sélectionné à l'aide du tournevis chirurgical manuel Réf. SMSD/LMSD.

Le choix du pilier de cicatrisation dépend de chaque cas. Il doit correspondre à la plateforme de l'implant et s'adapter à la hauteur du tissu gingival pour éviter l'occlusion du pilier. Une hauteur excessive pourrait soumettre l'implant à une charge prématurée, compromettant ainsi le processus d'ostéointégration.



Protocole chirurgical simplifié

Protocole de fraisage - ZPlus

Rotation Irrigation requise Diamètre fraise Couple de serrage

Les vitesses détaillées sont celles recommandées

Ø Fraise	900 Rpm	900 Rpm	700 Rpm	700 Rpm	600 Rpm	600 Rpm	500 Rpm	500 Rpm	25 Rpm	300 Rpm
Ø 2,30 mm	900 Rpm	900 Rpm	700 Rpm	700 Rpm	600 Rpm	600 Rpm	500 Rpm	500 Rpm	25 Rpm	300 Rpm
Ø 2,80 mm										
Ø 3,00 mm										
Ø 3,25 mm										
Ø 3,50 mm										
Ø 3,75 mm										
Ø 4,00 mm										

1 Utiliser CA** en option

2

TARAUD ET FRAISE CORTICALE

1 Utilisation du taraud
Selon le type d'os

Type I	Total
Type II	2/3
Type III - IV	Pas nécessaire

**Si l'option du contre-angle est choisie, la limite de vitesse de rotation maximale doit être prise en compte.

2 Utilisation de la fraise corticale
Selon le type d'os

Type I	Total
Type II	Dépend de l'épaisseur corticale
Type III - IV	Pas nécessaire

Incision	Mise en forme de l'ostéotomie								Taraudage	Fraisage
RÉF.	SID00	OSPD23	OSTD28	OSTD30	OTD32	OSTD35	OTD37	OTD40	TAPST33/MTAPST33	OTD0CZ
MSID00										
MSID00T										
NP (Ø3,30mm)			FACULTATIF						TAPST37/MTAPST37	OTD02CZ
RP (Ø3,70mm)				FACULTATIF					TAPST40/MTAPST40	OTD02CZ
RP (Ø4,00mm)					FACULTATIF				TAPST42/MTAPST42	OTD02CZ
RP (Ø4,30mm)						FACULTATIF			TAPST46/MTAPST46	OTD03CZ
WP (Ø4,60mm)							FACULTATIF		TAPST50/MTAPST50	OTD03CZ
WP (Ø5,00mm)								FACULTATIF		

*** Pour le fraisage dans un os de type I/type II, augmentez de 200 tr/min les vitesses indiquées dans le graphique ci-dessus. Utilisez la fraise lance millimétrée MSID00/MSID00T avant la fraise pilote.**
INFRAFRAISAGE : évaluez dans les os de type III et IV.
IMPORTANT : contrôlez l'axe de fraisage en appliquant une pression intermittente (tapping) toujours dans le plan vertical, en veillant à ne pas exercer une trop grande pression sur l'os.

Insertion de l'implant - ZPlus

■ Insertion

25 Rpm 50 Ncm

Insertion

XSMIN / TSMIN
TLMIN / TMINX
O2MMIN

■ Démontage du Mount *

Point d'insertion où il faut le démonter selon le type d'os

Type I	À 1/2 d'insertion
Type II	À 3/4 d'insertion
Type III	À 4/5 d'insertion
Type IV	Avec insertion complète

Recommandations sur le Mount ZPlus

En cas de grippage ou de soudure à froid du ZPlus sur l'implant après son insertion, évitez de manipuler le Mount avec des instruments d'une manière qui pourrait nuire à sa stabilité primaire. Utilisez exclusivement la vis d'extraction Ziacom® de la référence EDSZ20 (NP) ou EDSZ34 (RP/WP).

En insérant la vis d'extraction (avec un tournevis de 1,25 mm et un couple manuel) dans les sens des aiguilles d'une montre, on obtient un contact attendu de son apex avec l'implant, ce qui déverrouille le Mount et le libère pour le retrait.

Extraction de la vis

Verrouillez le ZPlus Enlevez la vis

Une fois la vis enlevée, retirez le ZPlus manuellement

RÉF. SMSD/LMSD avec 01MOHW

IMPORTANT
Important : dans le cas où le ZPlus est retenu avec l'implant, utilisez la vis d'extraction pour faciliter le retrait : avec la plateforme NP, utilisez la référence EDSZ20, et avec RP/WP, utilisez la référence EDSZ34

■ Insertion directe

25 Rpm 50 Ncm

Insertion


SMZ / LMZ (NP) ●
MMZ / MMZA (RP/WP) ●●

SMZ1 / LMZ1 (RP/WP) ●●
MMZ1 / MMZ1A (RP/WP) ●●

Protocole de fraisage - Ziacom® No Mount

Rotation
 Irrigation requise
 Diamètre fraise
 Couple de serrage

Les vitesses détaillées sont celles recommandées

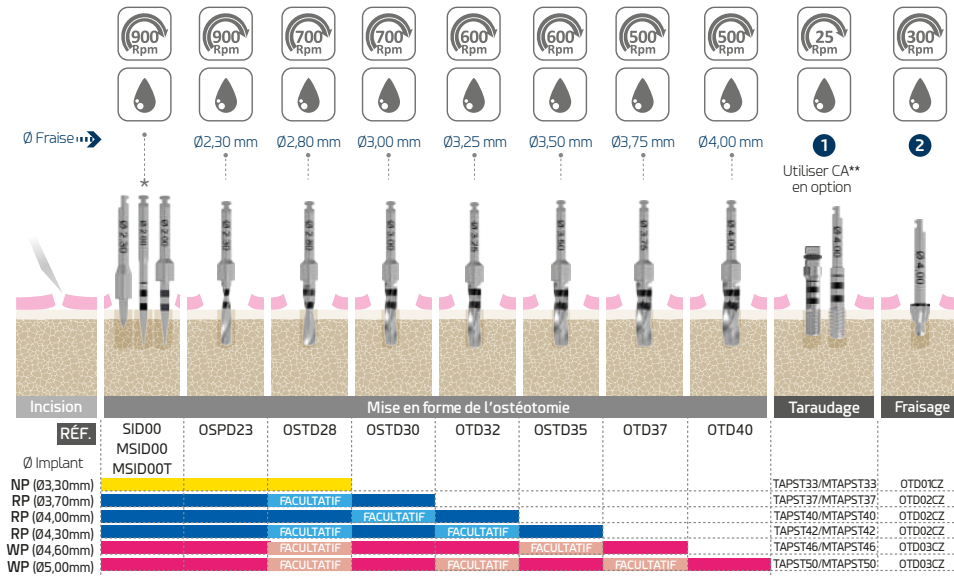

TARAUD ET FRAISE CORTICALE

1 Utilisation du taraud
 Selon le type d'os

Type I	Total
Type II	2/3
Type III - IV	Pas nécessaire

**Si l'option du contre-angle est choisie, la limite de vitesse de rotation maximale doit être prise en compte.

2 Utilisation de la fraise corticale
 Selon le type d'os

Type I	Total
Type II	Dépend de l'épaisseur corticale
Type III - IV	Pas nécessaire

* Pour le fraisage dans un os de type I/type II, augmentez de 200 tr/min les vitesses indiquées dans le graphique ci-dessus. Utilisez la fraise lance millimétrée MSID00/MSID00T avant la fraise pilote.

INFRAFRAISAGE : évaluez dans les os de type III et IV.

IMPORTANT : contrôlez l'axe de fraisage en appliquant une pression intermittente (tapping) toujours dans le plan vertical, en veillant à ne pas exercer une trop grande pression sur l'os.

Protocole chirurgical simplifié

Insertion de l'implant - Ziacom® No Mount

■ Sur Ziacom® No Mount

Les implants Ziacom® sont disponibles sans transporteur. Ce format de plaquette thermoformée permet aux implantologues de retirer aisément l'implant de la fiole et de le placer dans le site chirurgical avec un instrument direct en une seule étape, ce qui permet de gagner du temps pendant l'intervention. L'implant sans transporteur facilite l'instrumentation dans les espaces confinés et permet une meilleure visibilité du champ de travail.

Les nouvelles clés d'insertion Zinic® directes sur l'implant référence SMZ/LMZ/MMZ/MMZA (NP) et SMZ1/LMZ1/MMZ1/MMZ1A (RP/WP) sont dotées d'un dispositif de centrage sur la partie de serrage pour éviter d'endommager la connexion et d'une rondelle sur l'extrémité active pour assurer une fonction rapide et sûre de transport de l'implant vers le site chirurgical.



■ Insertion directe




Insertion

SMZ / LMZ	(NP)	●
MMZ / MMZA		
SMZ1 / LMZ1	(RP/WP)	●
MMZ1 / MMZ1A		●

■ Pose crestale

La plateforme des implants Ziacom® doit être placée au niveau de la crête osseuse.

Position sous-crestale RECOMMANDÉE

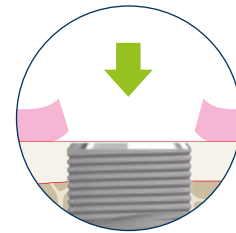

■ Types d'os

Classification de Lekholm et Zarb (1985)



OS TYPE IV - OS MOU

- Corticale mince entourant l'os spongieux, pas très dense.



OS TYPE II et III - OS MOYEN

- Type II : os compact et large entourant l'os spongieux dense.
- Type III : la corticale mince entoure l'os spongieux dense.



OS TYPE I - OS DUR

- Elle est composée presque exclusivement d'os compact homogène.

Recommandations générales

À prendre en compte lors de l'intervention



Les fraises chirurgicales doivent être insérées dans le contre-angle, moteur chirurgical à l'arrêt, en veillant à ce que l'ancrage et la rotation soient corrects avant de commencer le fraisage. Traitez les fraises avec le plus grand soin : le moindre dommage aux embouts peut compromettre leur efficacité.



Chaque instrument doit être utilisé uniquement pour l'usage spécifique recommandé par le fabricant.




Les instruments endommagés doivent être éliminés conformément à la réglementation locale.




L'implantologue doit conserver dans la fiche patient l'une des étiquettes d'identification fournies avec le produit afin d'en assurer une bonne traçabilité.

Manipulation de la vis de fermeture

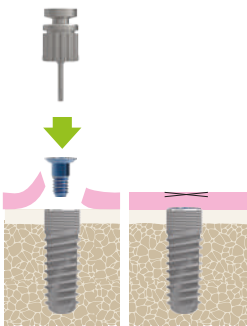

Retirez la vis de fermeture de sa file à l'aide du tournevis hexagonal, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Rapprochez-la de l'implant en évitant que la vis ne tombe et ne soit avalée accidentellement. Insérez-la dans l'implant jusqu'à sa fermeture, avec un couple de serrage manuel et dans le sens des aiguilles d'une montre.

Préparation à la deuxième phase chirurgicale

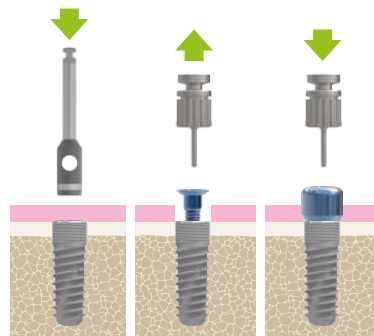

Pose du pilier de cicatrisation

Le pilier de cicatrisation doit correspondre à la plateforme de l'implant, en évaluant la possibilité d'appliquer la technique **platform switch** avec des piliers anatomiques, et être conforme à la hauteur du tissu gingival pour éviter l'occlusion du pilier. Une hauteur excessive pourrait soumettre l'implant à une charge prématurée, compromettant ainsi le processus d'ostéointégration.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Sur l'insertion de l'implant

Une compression excessive de l'os receveur peut entraîner la non-ostéointégration de l'implant.

Le non-respect des étapes décrites dans la séquence chirurgicale peut entraîner :

- Un manque de stabilité primaire dû à la perte de l'os de soutien.
- Des difficultés d'insertion de l'implant.

Le dépassement du couple (50 Ncm) lors de l'insertion de l'implant peut entraîner :

- Des déformations irréversibles de la connexion interne/externe.
- Des déformations irréversibles des instruments indiqués pour l'insertion de l'implant.
- Des difficultés à démonter l'ensemble instrument-implant.

Couple maximal d'insertion et de vitesse

Le couple d'insertion recommandé se situe entre **35 et 50 Ncm**, selon les cas, sans être limité à un seul couple.



Selon la densité et la qualité osseuse du site receveur, l'insertion de l'implant doit être effectuée avec un couple contrôlé.

Sans démonter son Mount, partiellement ou totalement, dans les **os de type III et IV respectivement**, avec un couple recommandé de **35 à 50 Ncm** pour éviter la déformation du Mount ou la soudure à froid avec l'implant.

En démontant son Mount et avec une clé directe sur l'implant, partiellement ou totalement, dans les **os de type II et I respectivement**, avec un couple de serrage recommandé de **35 à 50 Ncm** pour éviter la déformation de la connexion et une trop grande compression osseuse.

Instruments d'insertion ou tournevis en CA : utilisez une vitesse maximale de :



Implants Zinic®


Le protocole chirurgical Ziacom® établit la position crestantale de la plateforme de l'implant.

Pour éviter le stress cortical et la déformation de la clé et/ou de la connexion de l'implant, ainsi que le grippage du Mount, l'insertion avec un contre-angle (CA) doit respecter le régime maximal recommandé (**25 tr/min**) et le couple maximal indiqué (**50 Ncm**).

Lorsqu'on utilise une clé à cliquet non dynamométrique, il est nécessaire de surveiller la résistance pendant l'insertion. En cas de résistance, afin de libérer l'os des contraintes provoquées et de faciliter l'enfilage de la spire, il est recommandé d'extraire l'implant en deux tours et, après une pause de quelques secondes, de poursuivre l'insertion et de répéter ce processus autant de fois que nécessaire.

Avant d'utiliser le système Zinic® de Ziacom®, consultez toujours les protocoles chirurgicaux et prothétiques publiés dans ce catalogue, ainsi que les autres documents disponibles dans la rubrique « Bibliothèque » de notre site web www.ziacom.com/biblioteca qui font référence aux procédures, aux protocoles et au mode d'emploi.



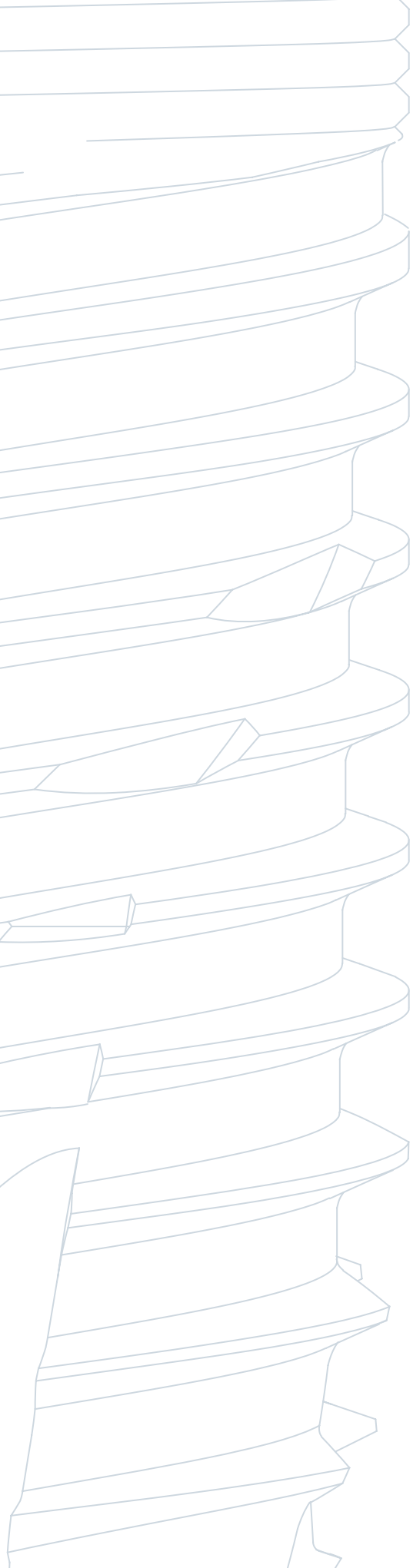

ZiNIC[®]

Nettoyage,
désinfection
et stérilisation



Nettoyage, désinfection et stérilisation

Les protocoles décrits ci-dessous ne doivent être réalisés que par du personnel qualifié pour le nettoyage, la désinfection et la stérilisation du matériel dentaire spécifié dans le présent document.

Instructions de nettoyage et de désinfection

Applicable aux instruments, aux cassettes chirurgicales et prothétiques et aux coiffes de rétention en plastique.

■ Démontage

1. Démontez* les instruments qui le nécessitent, par exemple les clés à cliquet manuelles, les fraises ou les butées de fraise.
2. Démontez les différents composants de la cassette chirurgicale ou prothétique pour les nettoyer correctement.

■ Nettoyage et désinfection

Pour la désinfection des instruments et des cassettes chirurgicales :

1. Plongez les instruments dans une solution détergente-désinfectante** indiquée pour les instruments dentaires afin de faciliter l'élimination des résidus biologiques qui y adhèrent. Si vous disposez d'un équipement à ultrasons***, vérifiez que le détergent-désinfectant est indiqué pour être utilisé avec un tel équipement.
2. Enlevez les résidus biologiques manuellement avec une brosse non métallique et un détergent à pH neutre.
3. Rincez abondamment à l'eau.
4. Pour le nettoyage des cassettes chirurgicales et prothétiques, utilisez toujours des détergents à pH neutre et des ustensiles non abrasifs afin de ne pas endommager les surfaces des cassettes.
5. Séchez le matériel avec des serviettes de cellulose jetables, ne laissant pas de fibres, ou avec de l'air comprimé.

Pour la désinfection des coiffes en plastique et du disque de protection :

1. Plongez-les pendant 10 minutes dans une solution de chlorure de benzalkonium pur.
2. Rincez à l'eau distillée.
3. Séchez les coiffes et le disque avant de les utiliser.

■ Inspection

1. Vérifiez que les instruments sont parfaitement propres ; si ce n'est pas le cas, répétez les étapes de nettoyage et de désinfection.
2. Jetez les instruments endommagés et remplacez-les pour la prochaine intervention.
3. Vérifiez que les instruments et les cassettes chirurgicales et prothétiques sont parfaitement secs avant de procéder à leur montage et à la stérilisation.

* Consultez les manuels de montage et démontage à l'adresse www.ziacom.com/biblioteca.

** Suivez les instructions du fabricant du produit désinfectant pour déterminer les concentrations et les durées.

*** Suivez les instructions du fabricant de l'équipement à ultrasons pour déterminer la température, la concentration et les durées.

Instructions de stérilisation à l'autoclave à vapeur

Applicable aux implants orthodontiques, aux compléments, aux instruments et aux cassettes chirurgicales et prothétiques.

1. Insérez le matériel individuellement dans des sachets de stérilisation, puis fermez les sachets. Pour la stérilisation conjointe, placez les instruments dans la cassette chirurgicale correspondante, insérez la cassette dans un sachet de stérilisation et fermez le sachet.
2. Insérez les sachets à stériliser dans l'autoclave.
3. Stérilisez dans un autoclave à vapeur à 134°C/273°F (max. 137°C/276°F) pendant quatre minutes (minimum) et à une pression de 2 atm. Les clés à cliquet dynamométriques doivent être stérilisées en trois cycles de vide à 132°C/270°F pendant au moins 1 minute et 30 secondes et séchés sous vide pendant au moins 20 minutes.

Uniquement pour les États-Unis : Le cycle de stérilisation validé et recommandé aux États-Unis doit être effectué en autoclave à vapeur, à 132°C/270°F, pendant une durée minimale de 15 minutes et avec un temps de séchage d'au moins 15 à 30 minutes.

IMPORTANT :

Veillez à ce que la phase de séchage soit terminée pour éviter que les produits ne sortent mouillés.

Vérifiez l'équipement de stérilisation si le matériel ou les sachets de stérilisation sont mouillés en fin de stérilisation.

Effectuez l'entretien de l'autoclave à la fréquence établie et en prenant les mesures nécessaires, conformément aux instructions du fabricant.



Conservation des produits Ziacom®


- Conservez les produits dans leur emballage d'origine et dans un environnement sec et propre jusqu'au moment de leur utilisation.
- Après la stérilisation, conservez les produits dans les sachets de stérilisation fermés et dans un environnement sec et propre.
- Ne dépassez jamais les dates de péremption fixées par le fabricant des sachets de stérilisation.
- Suivez toujours les indications du fabricant des sachets de stérilisation.

Recommandations générales

- N'utilisez jamais du matériel endommagé ou sale et ne réutilisez jamais des produits destinés à un usage unique. L'utilisateur est responsable de l'application correcte des instructions décrites dans ce document.
- Faites attention aux éléments tranchants et coupants. Le port de gants est recommandé lors du nettoyage du matériel afin d'éviter des accidents lors de la manipulation.
- Suivez les consignes de sécurité données par le fabricant de l'agent désinfectant.
- La stérilité ne saurait être garantie si le sachet de stérilisation est ouvert, endommagé ou mouillé.
- Respectez toutes les phases du stérilisateur. Si le matériel de stérilisation ou les sachets de stérilisation présentent des traces d'eau ou d'humidité, vérifiez l'autoclave et recommencez la stérilisation.
- Les compléments et les implants orthodontiques sont fournis NON STÉRILISÉS et doivent toujours être stérilisés avant utilisation.
- Les instruments et les cassettes chirurgicales et prothétiques sont fournis NON STÉRILISÉS et doivent toujours être stérilisés avant utilisation, puis nettoyés et désinfectés.
- Les processus de stérilisation, de nettoyage et de désinfection détériorent progressivement les instruments. Inspectez soigneusement les instruments pour détecter tout signe de détérioration.
- Évitez tout contact entre les produits composés de matériaux différents (acier, titane, etc.) pendant les processus de nettoyage, de désinfection et de stérilisation.
- Pour l'entretien correct et la sécurité de ses produits, Ziacom Medical SL recommande de suivre ces instructions. Par conséquent, la société n'est pas responsable de l'effet que l'utilisation d'autres procédures de nettoyage, de désinfection et de stérilisation par l'utilisateur peut avoir sur les produits.

Consultez la dernière version des instructions de nettoyage, de désinfection et de stérilisation à l'adresse www.ziacom.com/biblioteca.



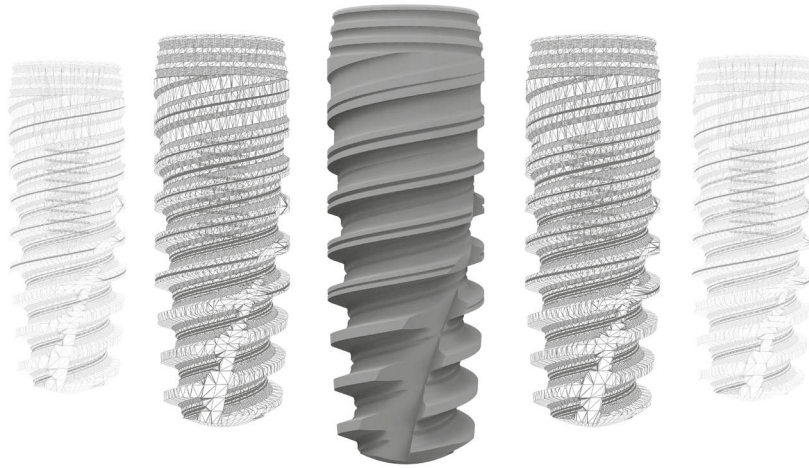

Veillez consulter les conditions générales de vente mises à jour sur notre site web www.ziacom.com.

Veillez vous référer à la disponibilité de chaque produit par pays.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette documentation ne saurait être reproduite, stockée sur un support ou un système de reproduction, ni transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, non couvert par le présent document, sans l'autorisation du titulaire des droits de la marque, de publication et d'impression. Ziacom® est une marque déposée de Ziacom Medical SL.

Veillez consulter la dernière version disponible des catalogues sur le site www.ziacom.com.



www.ziacom.com

Ziacom Medical SL

Calle Búhos, 2
28320 Pinto - Madrid - ESPAÑA
Tfno.: +34 91 723 33 06
info@ziacom.com

Ziacom Medical Portugal Lda

Av. Miguel Bombarda, 36 - 5° B
1050 -165 - Lisboa - PORTUGAL
Tel: +351 215 850 209
info.pt@ziacom.com

Ziacom Medical USA LLC

333 S.E 2nd Avenue, Suite 2000
Miami, FL 33131 - USA
Phone: +1 (786) 224 - 0089
info.usa@ziacom.com