

Caso clínico 1.

Fase Quirúrgica / Surgical Phase

Colaboración Dr. Víctor Cubillo Blasco.
Clínica Artedental. Tenerife

 ZiACOM®

 ZiACOM®
ZiNiCrT · ZM4MT

Género: Femenino

- Tratamiento: Colocación de Implante All on six
- Tipo y talla de implante: Zinic[®]MT
- 17 y 27 ø 3,60*13mm
- 14, 12, 22, 24 ø 3,6*11,5 mm

- Gender: Female
- Treatment: All on six technique
- Type and Implan size: Zinic[®]MT
- 17 y 27 ø 3,60*13mm
- 14, 12, 22, 24 ø 3,6*11,5 mm



Zinic[®]MT

► Implante All on six



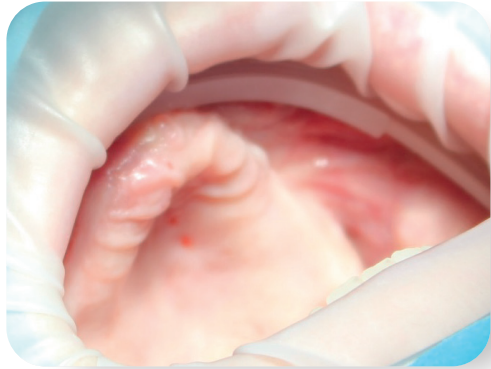




Foto inicial / Initial picture

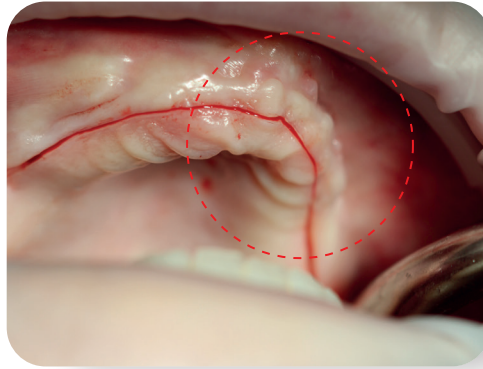

Insición quirúrgica / Surgical cut

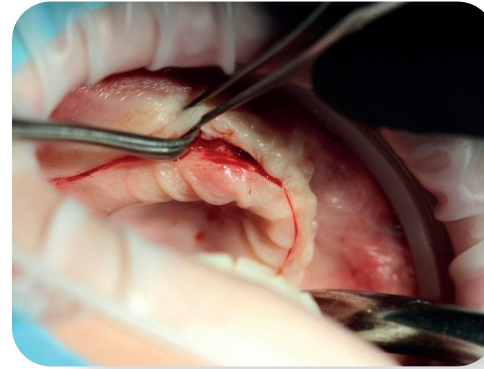

Levantamiento de colgajo / Flap reflection

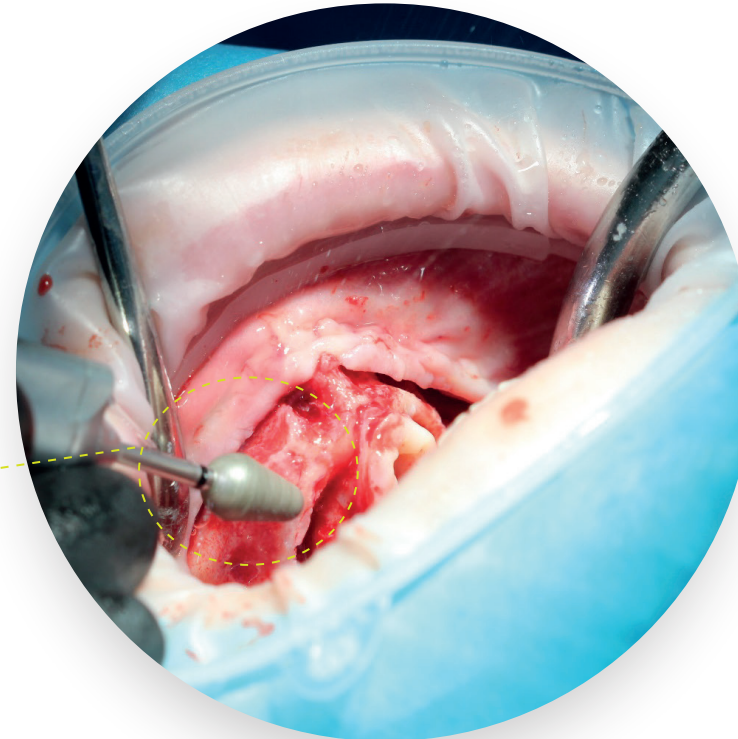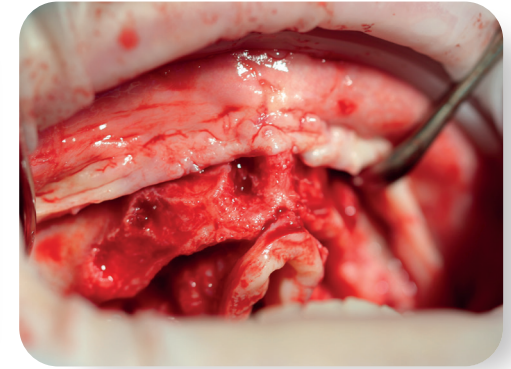

Regularización del reborde alveolar/
Alveolar ridge regularization

CAJA QUIRÚRGICA ZINIC°MT / ZM4°MT SURGICAL BOX



Referencias

Implante	Composición	Referencia
	Vacía	BOX400
■	Básica CA	BOX400SM
■	Completa CA	BOX400CM

MATERIAL: Radel / Esterilizable a 134°

ATENCIÓN - Vigile que la caja no toque las paredes del autoclave para evitar que se produzcan daños.


References

Implant	Components	Code
	Empty Box	BOX400
■	Basic CA	BOX400SM
■	Full CA	BOX400CM

MATERIAL: Radel / Sterilizable at 134°




CAUTION - Ensure that the box does not touch the walls of the autoclave to prevent damage.

SECUENCIA DE FRESADO / SURGICAL DRILLING

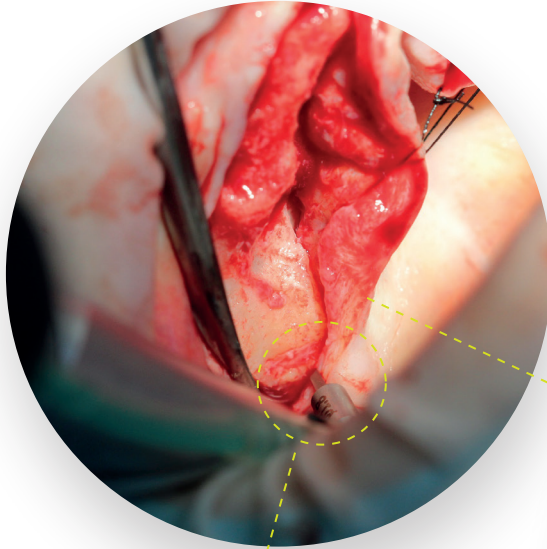

Fresa Lanza /Lance Drill



POSTE DE PARALELISMO / PARALLELING PIN

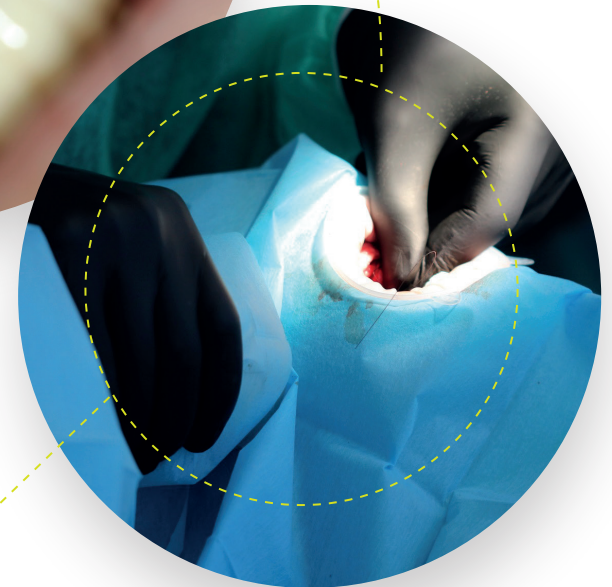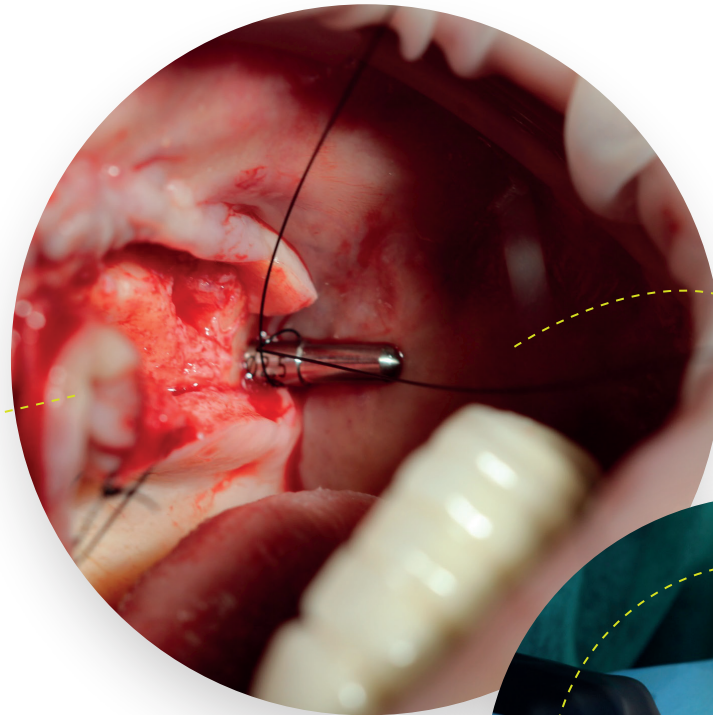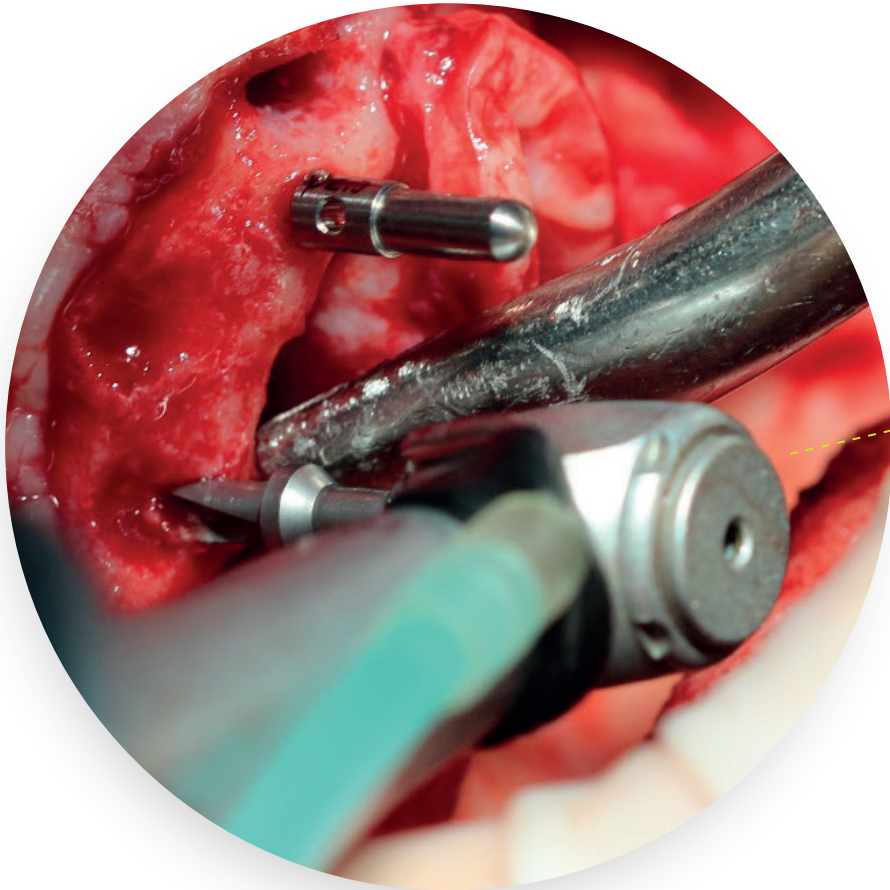




Radiografía periapical de control
/Periapical x-ray

► Implante All on six

SECUENCIA DE FRESADO / SURGICAL DRILLING

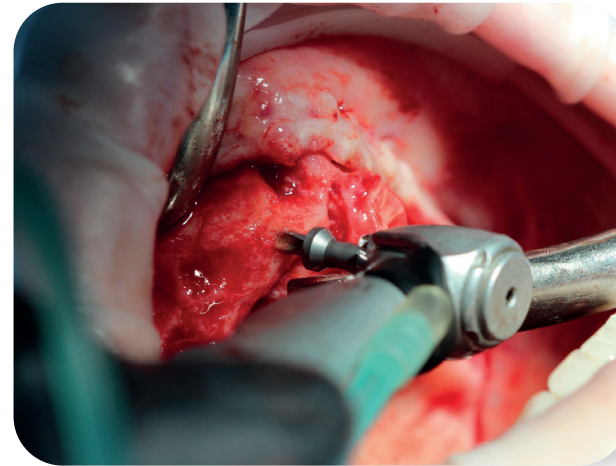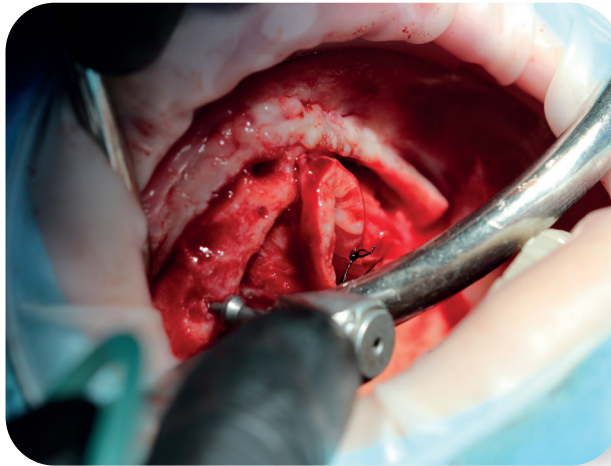

INSERCIÓN DE IMPLANTE CON CONTRA ÁNGULO / CONTRA-ANGLE IMPLANT PLACEMENT

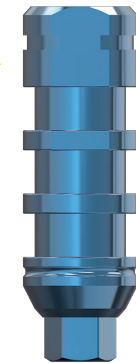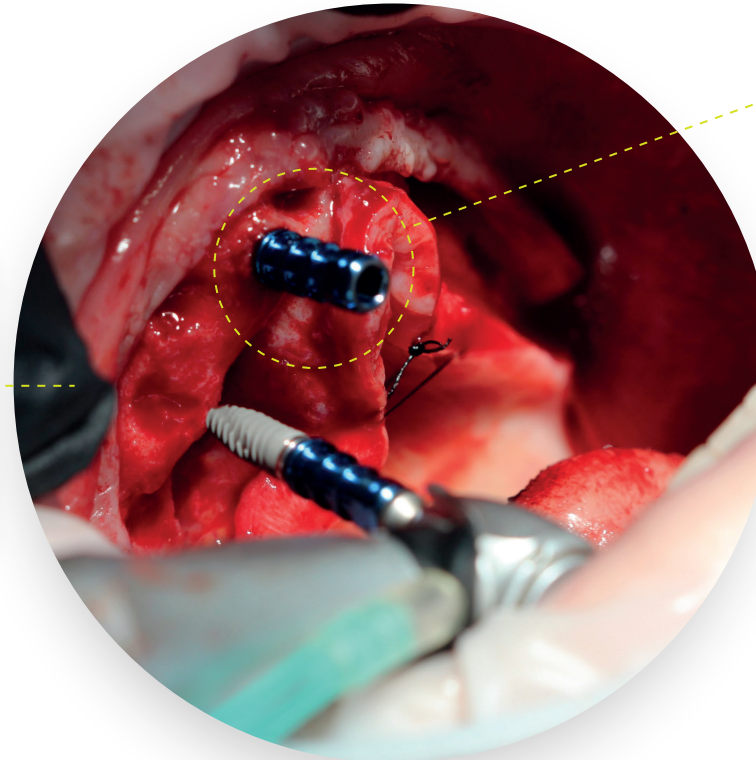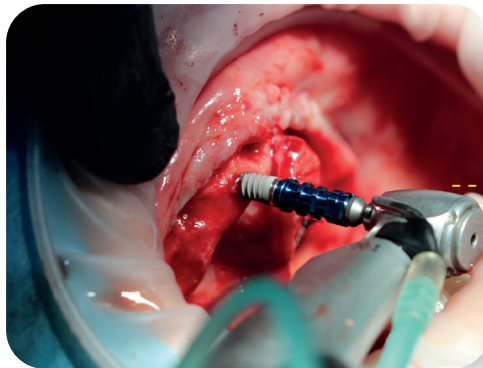

Incluido:
**Mount
ZPlus®**

Multifunción:

- Portaimplante
- Pilar de impresión
- Pilar provisional


Uses:

- Mount
- Impression transfer
- Provisional abutment


► Implante All on six




Toma de hueso del fresado
/Bone collected from drilling

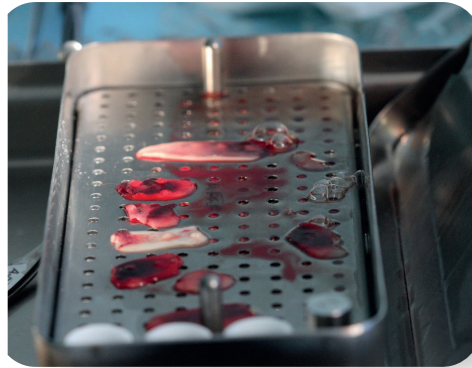


Membranas de PRF/
Prf membranes

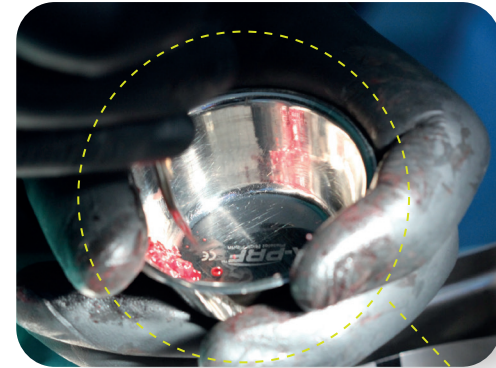

Mezclado de biomaterial
/ Bone grafting mixed

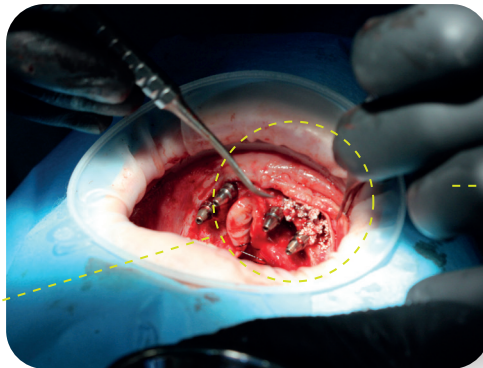




Colocación del injerto óseo
/ Bone grafting placement

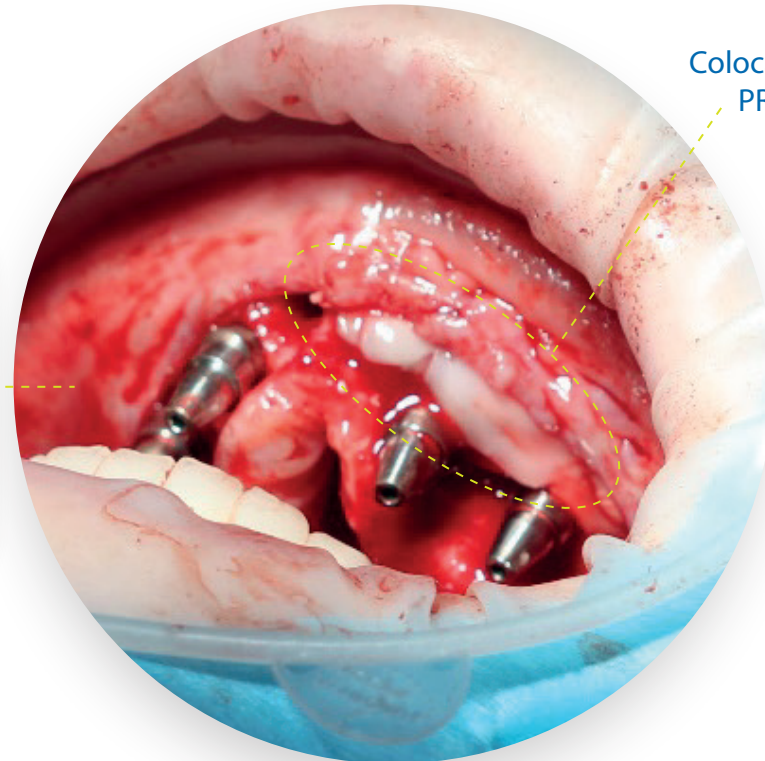

Colocación de membrana de PRF/
PRF membrane placement

► Implante All on six

SUTURA / SUTURE

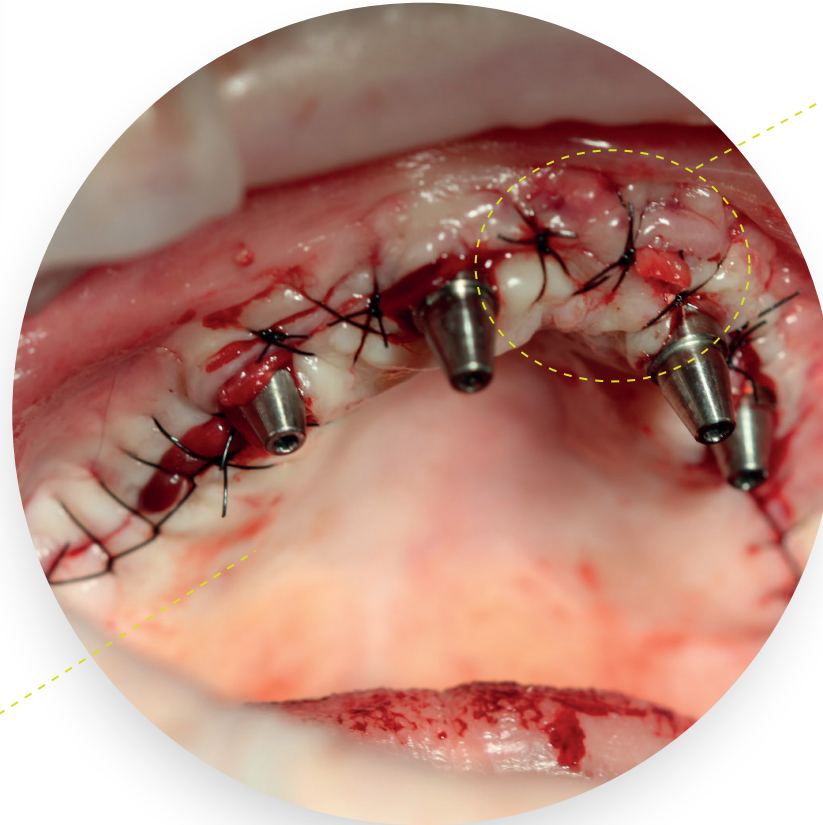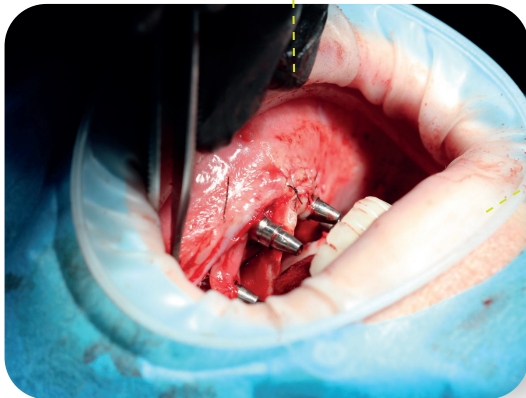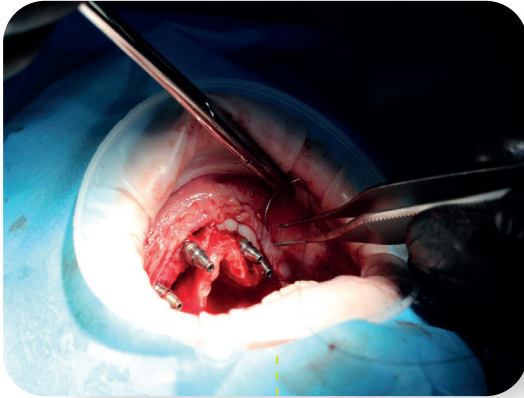


Sutura no reabsorbible/
Non reabsorbible suture

► Implante All on six

OTROS EQUIPOS/ OTHER EQUIPMENT

Medición ISQ con Ostell IDX / ISQ mesurment with osstell idx

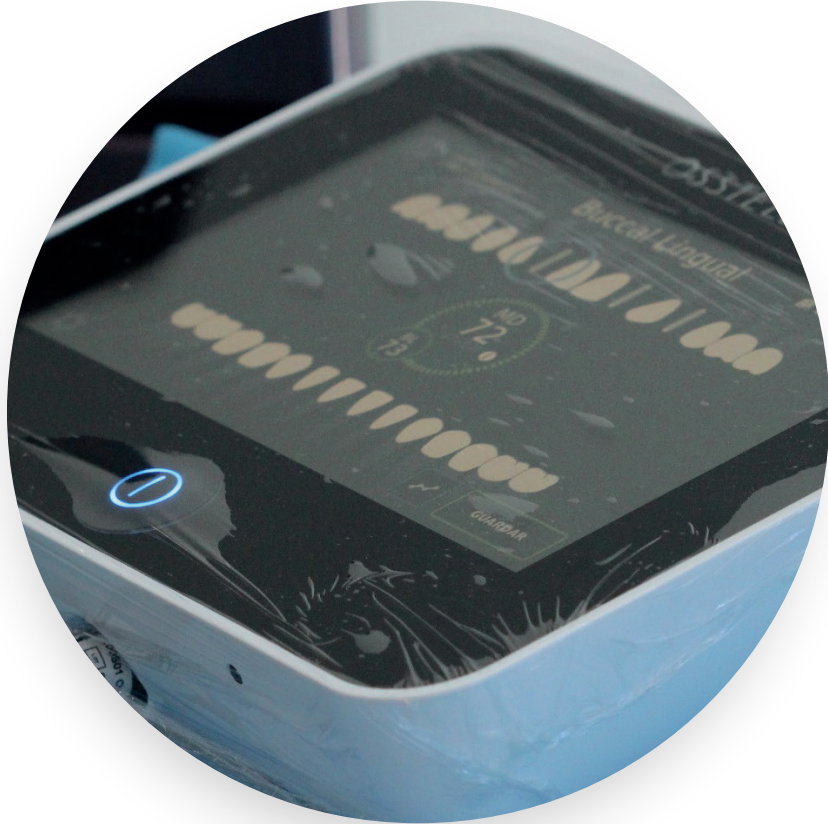

Caja protésica/ Prosthetic box

