

# Caso clínico 9.

## Fase Quirúrgica / Surgical Phase

Colaboración Dr. Víctor Cubillo Blasco.  
Clínica Artedental. Tenerife

ZIACOM®



Casos  
Clínicos

- Género: Masculino
- Tratamiento: Colocación de Implante All on six. Carga inmediata definitiva superior e inferior, con implantes posteriores superiores diferidos
- Tipo de implante: Zinic<sup>®</sup>MT

- Gender: Male
- Treatment: All on six technique. Definitive upper and lower immediate loading, postero superior implants delayed loading.
- Type of implant: Zinic<sup>®</sup>MT




Zinic<sup>®</sup>MT

Colocación de Implante All on six. Carga inmediata definitiva superior e inferior, con implantes posteriores superiores diferidos





FOTO INICIAL / INITIAL PICTURE

ORTOPANTOMOGRAFÍA INICIAL Y PLANIFICACIÓN /  
PANORAMIC X-RAY AND PLANNING

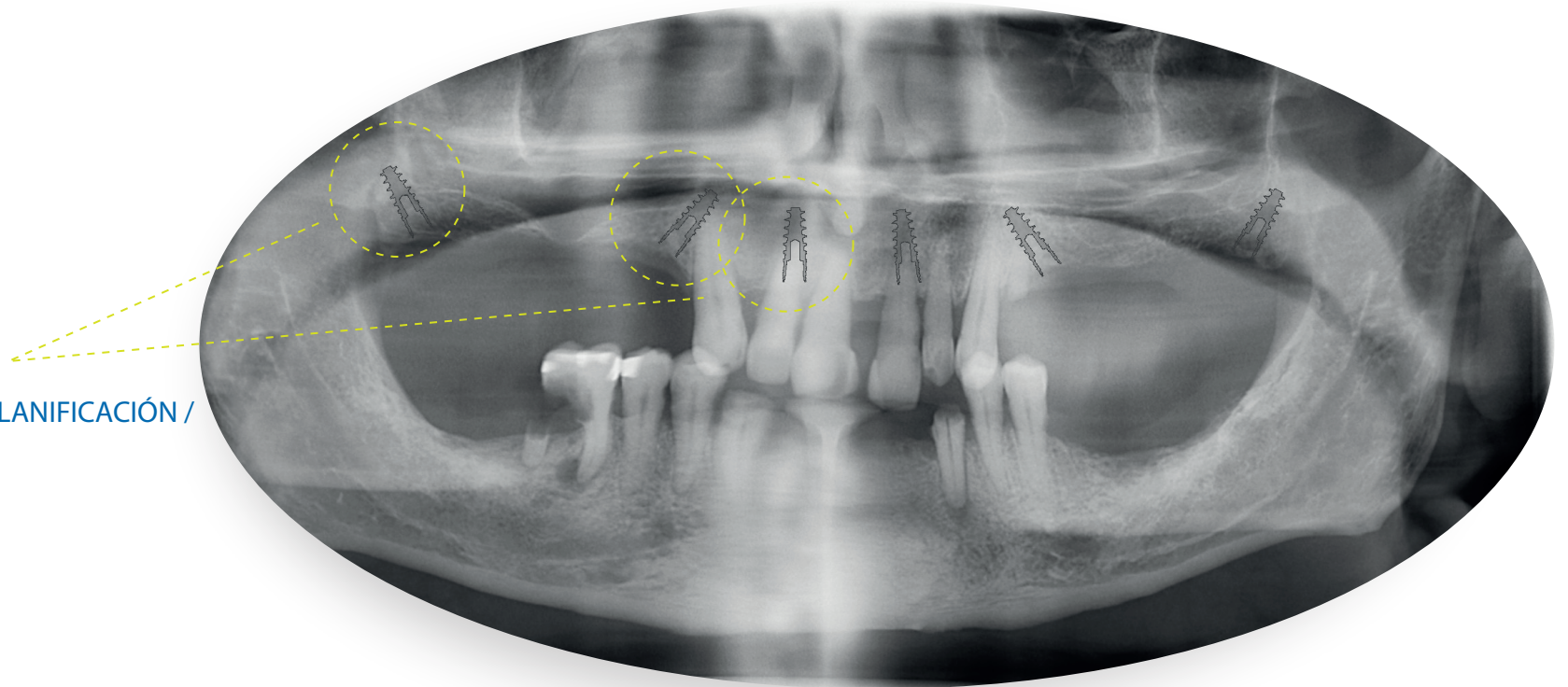

Colocación de Implante All on six. Carga inmediata definitiva superior e inferior, con implantes posteriores superiores diferidos



### EXPOSICIÓN DEL NERVIO MENTONIANO / EXPOSURE OF MENTAL NERVE

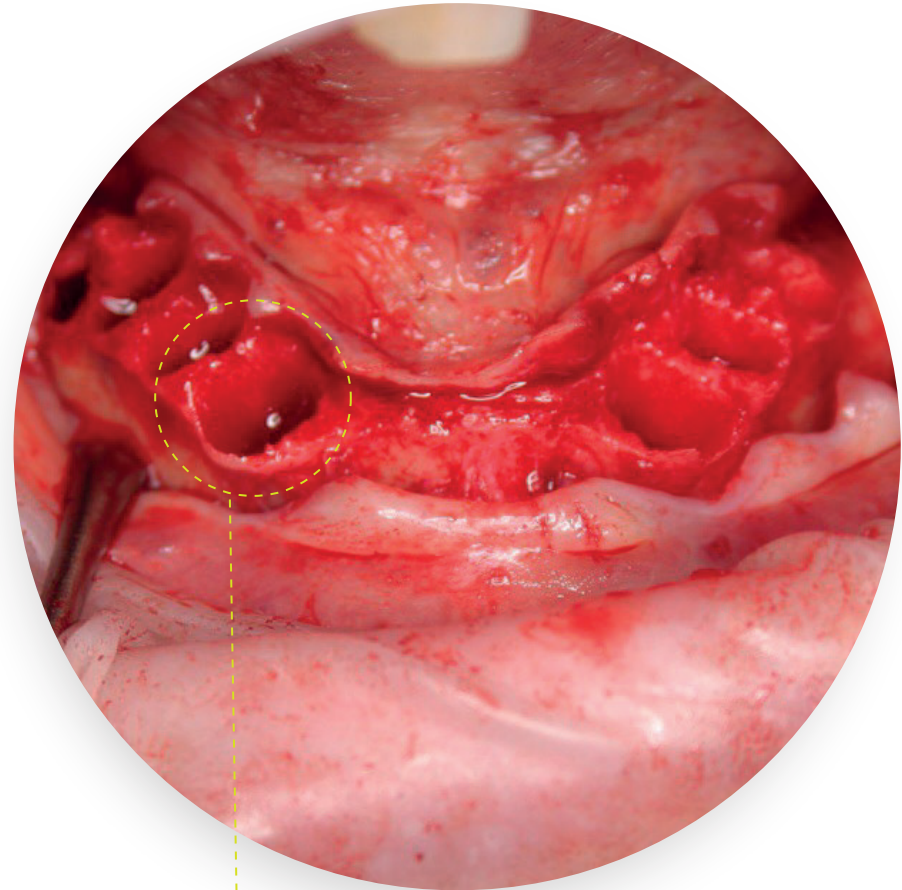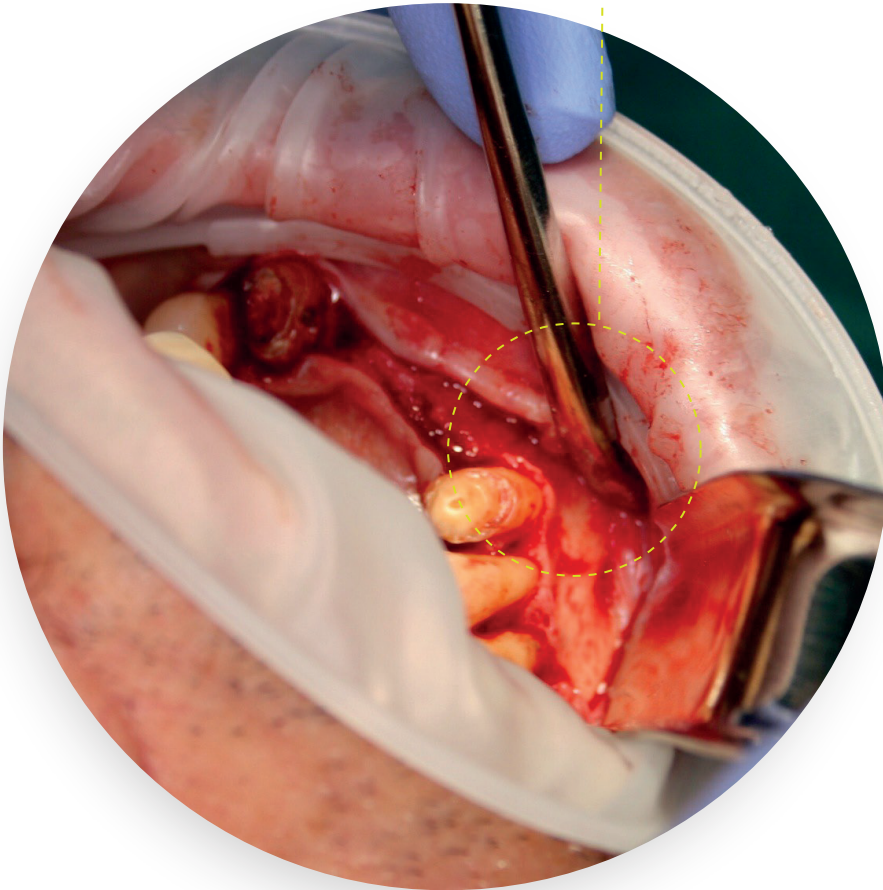

### EXODONCIAS Y LEVANTAMIENTO DEL COLGAJO / DENTAL EXTRACTION AND FLAP REFLECTION

► Colocación de Implante All on six. Carga inmediata definitiva superior e inferior, con implantes posteriores superiores diferidos

## VERIFICACIÓN DEL PARALELISMO / VERIFICATION OF PARALLELISM

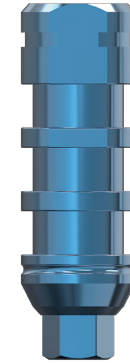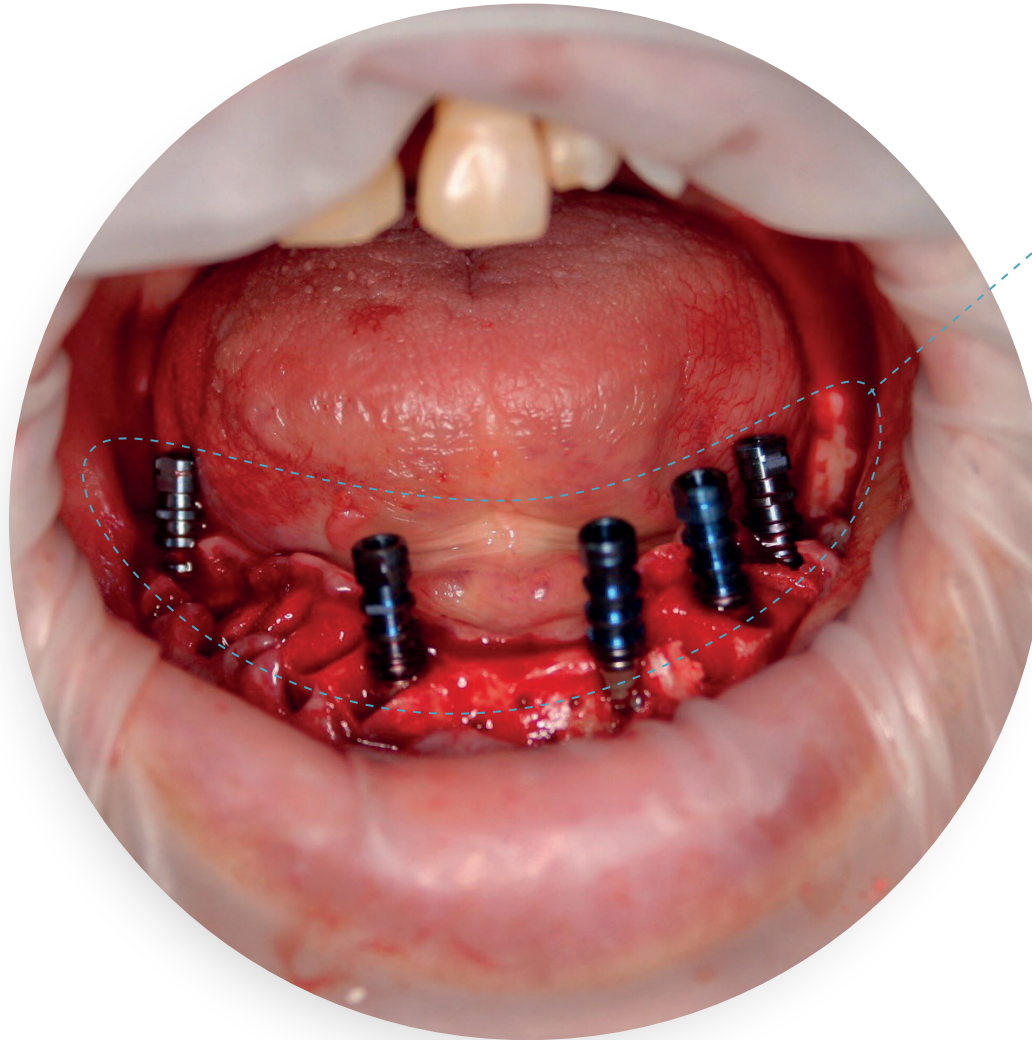

Incluido:  
**Mount  
ZPlus®**


**Multifunción:**

- Portaimplante
- Pilar de impresión
- Pilar provisional


**Uses:**

- Mount
- Impression transfer
- Provisional abutment

Colocación de Implante All on six. Carga inmediata definitiva superior e inferior, con implantes posteriores superiores diferidos

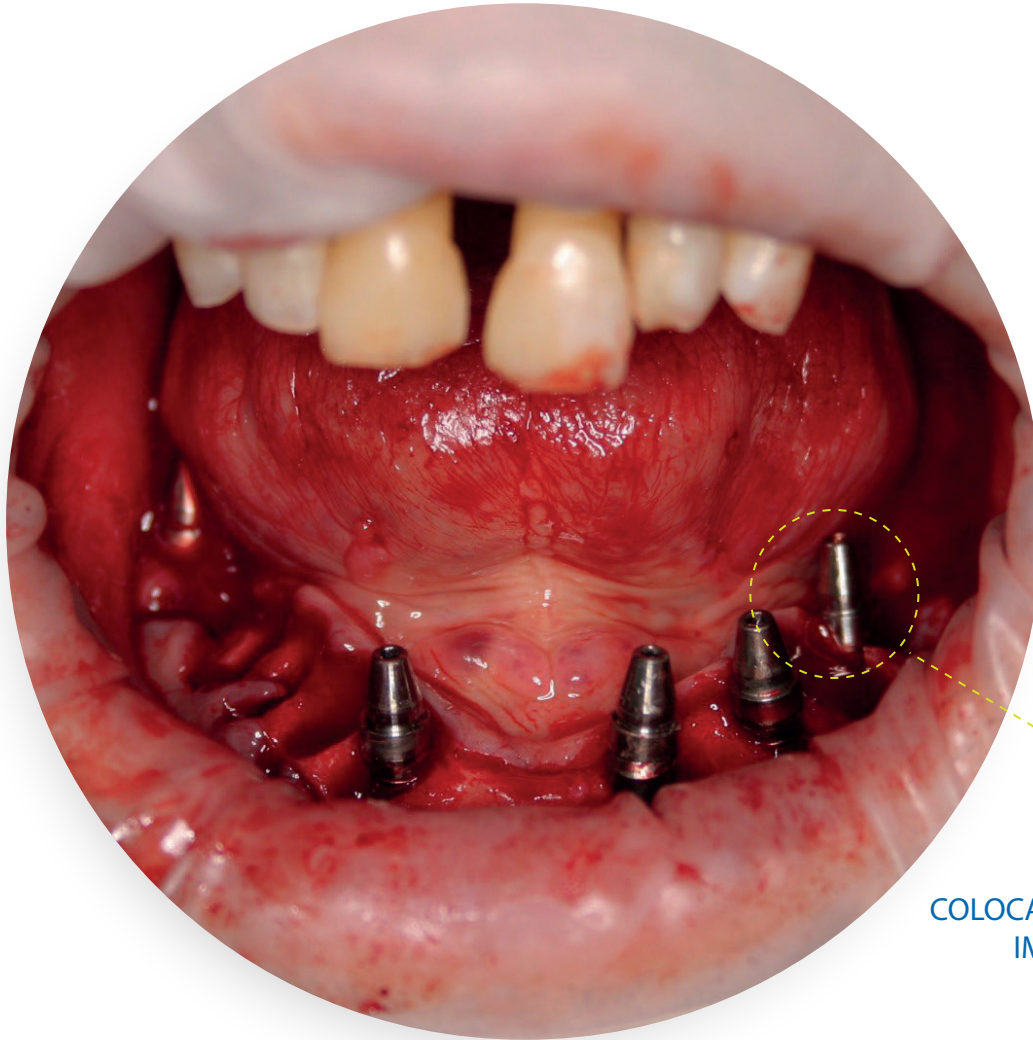

COLOCACIÓN DE LOS TRANSFER DE IMPRESIÓN /  
IMPRESSION TRANSFER PLACEMENT

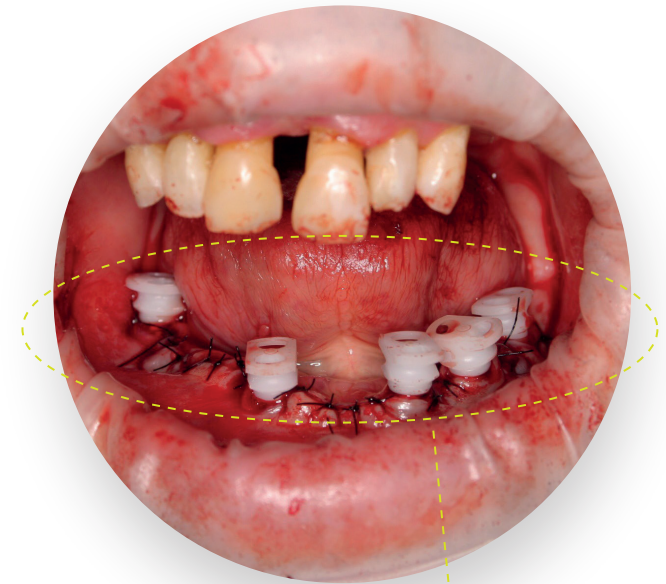


CLIP DE IMPRESIÓN / IMPRESSION CLIPS


► Colocación de Implante All on six. Carga inmediata definitiva superior e inferior, con implantes posteriores superiores diferidos

## A-PRF Y DENTINA PARA REGENERACIÓN ÓSEA / A-PRF AND DENTINE FOR BONE GRAFTING

MEMBRANAS DE A-PRF  
/ A-PRF MEMBRANE

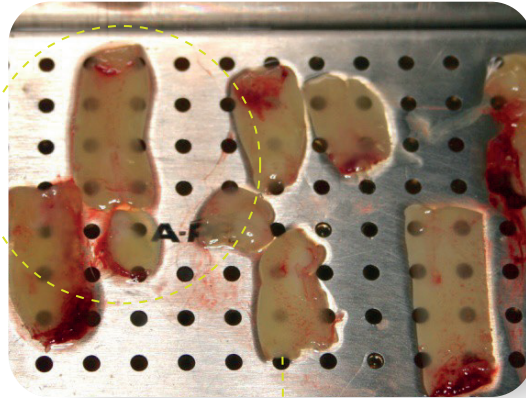


DENTINA  
/DENTINE

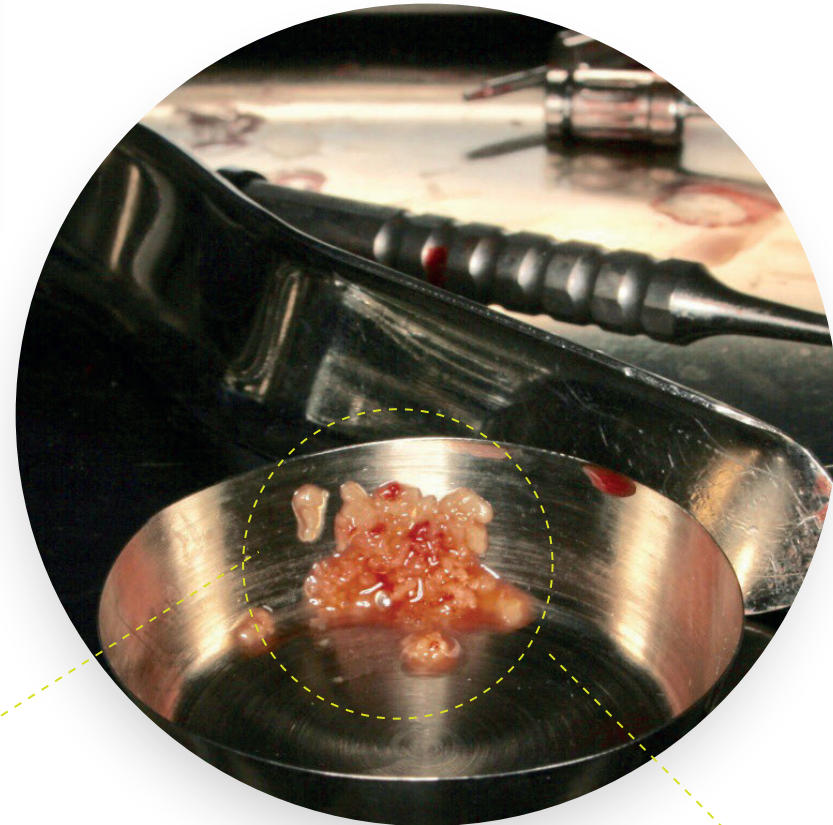


MEZCLA INJERTO ÓSEO  
/ BONE GRAFTING MIXED


Colocación de Implante All on six. Carga inmediata definitiva superior e inferior, con implantes posteriores superiores diferidos

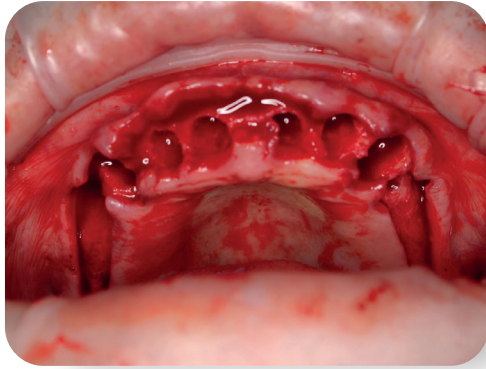

EXODONCIAS Y LEVANTAMIENTO DEL COLGAJO / DENTAL EXTRACTION AND FLAP REFLECTION

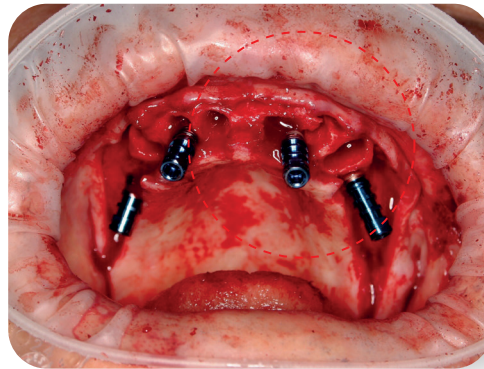

VERIFICACIÓN DEL PARALELISMO / VERIFICATION OF PARALLELISM

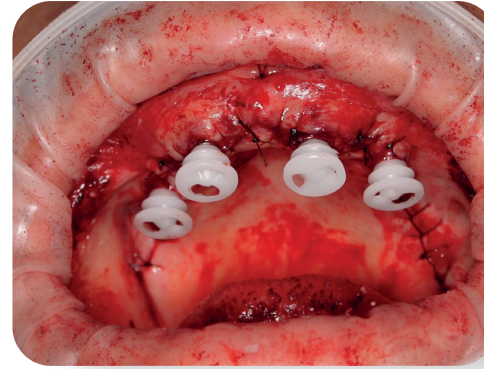

CLIP DE IMPRESIÓN / IMPRESSION CLIPS




TOMA DE ARCO FACIAL / FACE BOW REGISTRATION

RADIOGRAFÍA POSTQUIRÚRGICA / POST SURGICAL X-RAY

IMPLANTE PARA


TORNILLO DE CICATRIZACIÓN SOBRE X-DRIVE

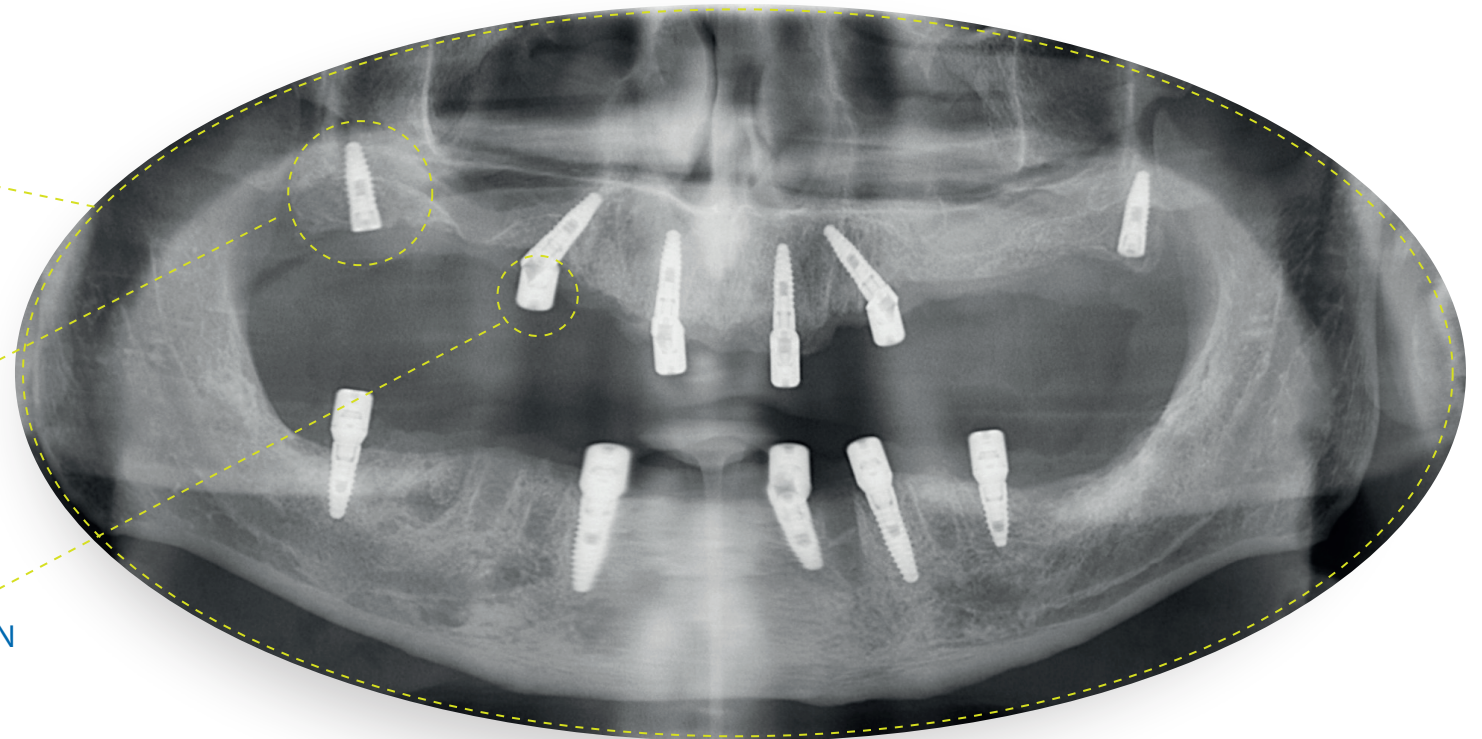



Colocación de Implante All on six. Carga inmediata definitiva superior e inferior, con implantes posteriores superiores diferidos

IMPLANTE PARA CARGA DIFERIDA  
/IMPLANT FOR DEFERRED LOAD

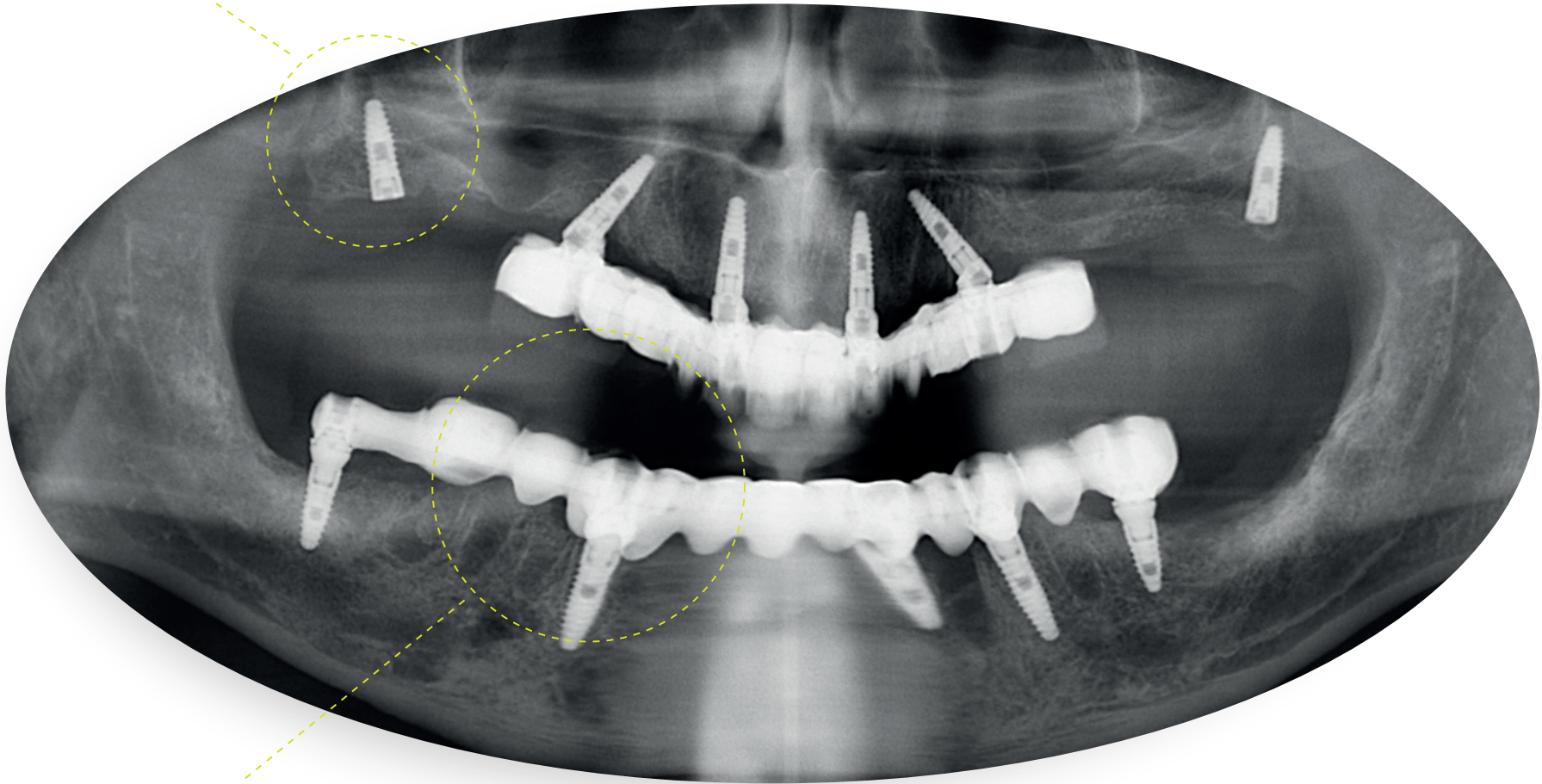


AJUSTE PASIVO DEL A ESTRUCTURA  
/PASIVE ADJUSTMENT OF STRUCTURE

Colocación de Implante All on six. Carga inmediata definitiva superior e inferior, con implantes posteriores superiores diferidos



PROTESIS HIBRIDA ATORNILLADA/  
HIBRID SCREWED PROTECTION

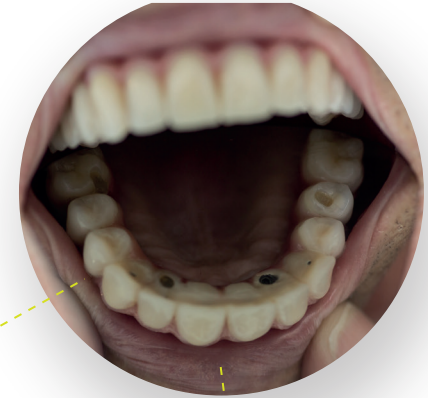

RESULTADO FINAL  
/FINAL RESULT

